

CATÁLOGO DE PRODUCTOS GASTROENTEROLOGÍA



INNOVACIÓN
QUE NO PARA

CALIDAD Y
CONFIANZA

TRANSPARENCIA
Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL

EL FUTURO
ESTÁ EN SUS
MANOS

SU SOCIO

PARA DISPOSITIVOS Y
ACCESORIOS PARA ENDOSCOPIA
GASTROINTESTINAL





TABLA DE CONTENIDOS

PINZA PARA TOMA DE BIOPSIAS	7
PINZAS DE BIOPSIAS	8
DILATACIÓN	11
BALONES PARA DILATACIÓN	12
SISTEMAS PARA INFLADO	15
RESECCIÓN Y RECUPERACIÓN	16
POLIPECTOMÍA-EMR-ESD	
ENDO INK	17
BLUE BEACON	18
BLUEBOOST	19
ASAS PARA POLIPECTOMÍA	20
ASAS FRÍAS	22
LESION HUNTER	24
EDGEHOG	26
EXTRACCIÓN	
ENTRAP	27
PINZAS PARA EXTRACCIÓN	29
RECUPERACIÓN DE PÓLIPOS	30
HEMOSTASIS	31
AGUJAS PARA INYECCION	
CLIPS PARA HEMOSTASIA	34
SURECLIP	36
LOCKADO	38
LIGADORES MULTIBANDA	40
SUREFIRE	41
PREVENCIÓN DE INFECCIONES	43
VÁLVULAS PARA ENTRADA DEL CANAL	44
PROTECTORES BUCALES PARA EL ENDOSCOPIO	45
CEPILLOS PARA LIMPIEZA	46
STENTS DE NITINOL	47
STENTS ESOFÁGICOS	48
STENTS DUODENALES	53
STENTS COLÓNICOS	55
STENTS BILIARES	57
STENTS PARA PSUDOQUISTES PANCREÁTICOS	59

AGUJAS PARA EUS (Ultrasonografía Endoscópica) _____ 61

FNA 62

FNB

CPRE _____ 65

ESFINTERÓTOMOS AJUSTABLES 66

ALAMBRE GUÍA 68

BALÓN PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS 70

CANASTILLAS PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS 72

STENTS DE PLÁSTICO 74

STENT PLÁSTICO CON SISTEMA DE ALAMBRE GUÍA CORTO 79

COLANGIOSCOPIA _____ 81

EYEMAX 82

CONSOLA

COLEDOSCOPIOS

PINZA DE BIOPSIA

CANASTILLA DE EXTRACCIÓN

CAP PARA VISUALIZACIÓN

CIRURGIA ENDOSCOPICA _____ 85

GOLD KNIFE 86

SURE TRAC 89

CIERRE DE DEFECTOS

DAT - DUAL ACTION TISSUE 90

S.T.A.R - SECURE TISSUE ACQUISITION RING 92

LOCKADO 94



Los productos de este catálogo están destinados a la región de América Latina. Los productos pueden no estar disponibles para la venta en todas las regiones/países. No está disponible para la venta en los Estados Unidos.

CÓMO HACER EL PEDIDO



LLAMADA

877.552.4027

Lunes a viernes

8:30 AM – 6:00 PM EST



EMAIL

latam@mtmed.com



CORREO

Micro-Tech Endoscopy USA

2855 Boardwalk Drive

Ann Arbor, MI 48104



El más vendido en esta categoría de productos



BIOPSIA

PINZAS PARA TOMA DE BIOPSIAS



COPAS DE PRECISIÓN

PINZAS DE BIOPSIA

TECHBITE™

Para biopsias grandes y de corte preciso, las pinzas Techbite™ de Micro-Tech Endoscopy están equipadas con un diseño especial, que se caracteriza por:

- Copas con un rendimiento de corte preciso que permiten una adquisición de muestras significativa.
- Mecanismo en forma de eje de levas con extremo rígido corto.

* Solo con fines ilustrativos



MECANISMO DE ACCIONAMIENTO COMPACTO

Permite un paso suave por el canal de trabajo, y minimiza el riesgo de daños en el endoscopio.

COPAS DE PRECISIÓN

Evita desgarrar la mucosa.



RECORRIDO CORTO

PRINCIPALES VENTAJAS

MANGO ERGONÓMICO

El mango ligero con anillo para el pulgar y de recorrido corto proporciona un control óptimo.

COPAS DE PRECISIÓN

La tecnología de copas estampadas proporciona un diseño consistente con la máxima capacidad de tejido.

AMPLIA VARIEDAD

Lisas y dentadas, con y sin estilete, para diferentes diámetros de canales de trabajo.



ESPECIFICACIONES

PINZAS DE BIOPSIA PARA CANALES DE ENDOSCOPIO DE 2,0mm



Ref	Estilo de la pinza	Apertura (mm)	Diámetro pinza (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque
EBF33-11018180	Estándar	4,5	1,8	1800	10/Caja

PINZAS DE BIOPSIA PARA CANALES DE ENDOSCOPIO DE 2,8mm



Ref	Estilo de la pinza	Apertura (mm)	Diámetro pinza (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque
EBF33-11023180	Estándar	6,7	2,3	1800	10/Caja
EBF33-11023230	✓ Estándar	6,7	2,3	2300	10/Caja
EBF33-11123180	Estándar con estilete	6,7	2,3	1800	10/Caja
EBF33-11123230	Estándar con estilete	6,7	2,3	2300	10/Caja
EBF43-11023180	Dentada	6,7	2,3	1800	10/Caja
EBF43-11023230	✓ Dentada	6,7	2,3	2300	10/Caja

PINZAS DE BIOPSIA DE GRAN CAPACIDAD PARA CANALES DE ENDOSCOPIO DE 2,8mm

Disponible solo en configuración TruBite



Ref	Estilo de la pinza	Apertura (mm)	Diámetro de pinza (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque
LCNBF63-10024180	Dentada	9,0	2,4	1800	10/Caja
LCNBF63-10024230	Dentada con estilete	9,0	2,4	2300	10/Caja
LCNBF13-10024230	Dentada	9,0	2,4	2300	10/Caja



ESPECIFICACIONES

PINZAS DE BIOPSIA PARA CANALES DE ENDOSCOPIO DE 2,0mm



Ref	Estilo de la pinza	Apertura (mm)	Diámetro pinza (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque
EBF33-11018180	Estándar	4,5	1,8	1800	10/Caja

TRUBITE BIOPSY FORCEPS

Ref	Estilo de la pinza	Diámetro pinza (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque
NBF03-11018180	Oval	1,8	1800	10/Caja
NBF03-11023160	Oval	1,6	1600	10/Caja
NBF03-11023180	Oval	1,8	1800	10/Caja
NBF03-11023230	Oval	2,3	2300	10/Caja
NBF03-11123230	Oval	2,3	2300	10/Caja

TRUBITE FORCEPS

Ref	Estilo de la pinza	Diámetro pinza (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque
NBF13-11023180	Dentada	1,8	1800	10/Caja
NBF13-11023230	Dentada	2,3	2300	10/Caja
NBF13-11123230	Dentada con spike	2,3	2300	10/Caja



DILATACIÓN

BALONES PARA DILATACIÓN
SISTEMAS PARA INFLADO



BALONES PARA DILATACIÓN


FUERZA Y CONTROL

Elija la fuerza y control al dilatar estenosis con los dilatadores guiados por alambre guía de Micro-Tech.

Los balones de etapas múltiples con extremos redondeados están fabricados con Pebax® transparente de primera calidad.

Los balones de etapas múltiples pueden inflarse en tres tamaños diferentes, lo que proporciona una dilatación controlada y elimina la necesidad de utilizar varios balones en un mismo procedimiento.

Los balones se suministran pre-cargados con un alambre guía de 0.035" lo que facilita su ubicación en anatomías tortuosas o alteradas.

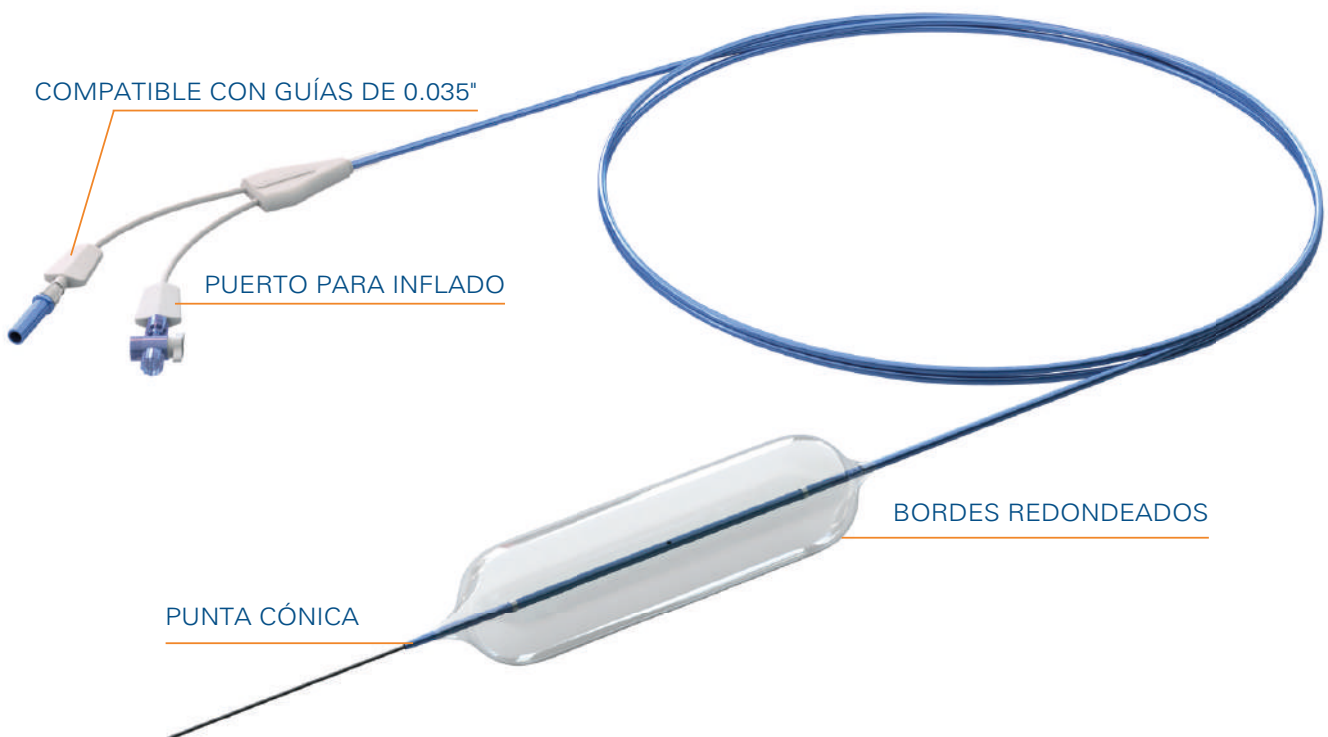

PRINCIPALES VENTAJAS

PEBAX DE ALTA CALIDAD

Produce un balón con las características y el rendimiento que exigen los usuarios. Expansión radial precisa de tres tamaños, bordes redondeados, visibilidad clara y fuerza controlada.

VISIBILIDAD BAJO FLUOROSCOPIA

Todos los balones con alambre guía presentan dos marcadores radiopacos en el borde del balón, lo que permite una colocación precisa a través de la estenosis. El puerto específico para inflado permite introducir contraste para mejorar aún más la visibilidad si se desea.

PUNTA CÓNICA

La punta redondeada facilita el paso suave del balón a través de la estenosis. El balón se suministra con una guía precargada de 0.035" que tiene una punta suave y flexible para ayudar a la ubicación en anatomías tortuosas o alteradas.



ESPECIFICACIONES

MULTIETAPA CON ALAMBRE GUÍA - ESOFÁGICO/PILÓRICO

Ref	Tipo de Balón	Diámetro del Balón (mm)	Diámetro del Catéter (mm)	Longitud del Balón (mm)	Catéter Longitud (mm)	Canal de Trabajo Mínimo (mm)
MBD-AM-BA-2	Multietapa con Alambre Guía	6-7-8	7	55	1800	2,8
MBD-BM-BA-2	Multietapa con Alambre Guía	8-9-10	7	55	1800	2,8
MBD-CM-BA-2	Multietapa con Alambre Guía	10-11-12	7	55	1800	2,8
MBD-DM-BA-2 ✓	Multietapa con Alambre Guía	12-13.5-15	7	55	1800	2,8
MBD-EM-BA-2	Multietapa con Alambre Guía	15-16.5-18	7	55	1800	2,8
MBD-FM-BA-2	Multietapa con Alambre Guía	18-19-20	7	55	1800	3,2
MBD-BL-BA-2	Multietapa con Alambre Guía	8-9-10	7	80	1800	2,8
MBD-CL-BA-2	Multietapa con Alambre Guía	10-11-12	7	80	1800	2,8
MBD-EL-BA-2	Multietapa con Alambre Guía	15-16.5-18	7	80	1800	2,8

MULTIETAPA CON ALAMBRE GUÍA - BILIAR

Ref	Tipo de Balón	Diámetro del Balón (mm)	Diámetro del Catéter (mm)	Longitud del Balón (mm)	Catéter Longitud (mm)	Canal de Trabajo Mínimo (mm)
MBD-AS-BA-2 ✓	Multietapa con Alambre Guía	6-7-8	7	30	1800	2,8
MBD-BS-BA-2	Multietapa con Alambre Guía	8-9-10	7	30	1800	2,8
MBD-CS-BA-2	Multietapa con Alambre Guía	10-11-12	7	30	1800	2,8
MBD-DS-BA-2 ✓	Multietapa con Alambre Guía	12-13.5-15	7	30	1800	2,8

MULTIETAPA CON ALAMBRE GUÍA - COLÓN

Ref	Tipo de Balón	Diámetro del Balón (mm)	Diámetro del Catéter (mm)	Longitud del Balón (mm)	Catéter Longitud (mm)	Canal de Trabajo Mínimo (mm)
MBD-AM-BB-2	Multietapa con Alambre Guía	6-7-8	7	55	2400	2,8
MBD-BM-BB-2	Multietapa con Alambre Guía	8-9-10	7	55	2400	2,8
MBD-CM-BB-2 ✓	Multietapa con Alambre Guía	10-11-12	7	55	2400	2,8
MBD-DM-BB-2	Multietapa con Alambre Guía	12-13.5-15	7	55	2400	2,8
MBD-EM-BB-2	Multietapa con Alambre Guía	15-16.5-18	7	55	2400	2,8
MBD-FM-BB-2	Multietapa con Alambre Guía	18-19-20	7	55	2400	2,8



ESPECIFICACIONES

MULTIETAPA RELIANT

Ref	Tipo de Balón	Diámetro del Balón (mm)	Diámetro del Catéter (mm)	Longitud del Balón (mm)	Catéter Longitud (mm)
MBD-AS-BB-2 	Multietapa Reliant	6-7-8	7	30	2300
MBD-BS-BB-2	Multietapa Reliant	8-9-10	7	30	2300
MBD-CS-BB-2	Multietapa Reliant	10-11-12	7	30	2300
MBD-DS-BB-2	Multietapa Reliant	12-13.5-15	7	30	2300

DIÁMETRO ÚNICO CON ALAMBRE GUÍA - COLÓN

Ref	Tipo de Balón	Diámetro del Balón (mm)	Diámetro del Catéter (mm)	Longitud del Balón (mm)	Catéter Longitud (mm)	Canal de Trabajo Mínimo (mm)
BDC-8/55-7/24-A	Diámetro único con Alambre Guía (Precargado)	8	7	55	2400	2,8
BDC-10/55-7/24-A	Diámetro único con Alambre Guía (Precargado)	10	7	55	2400	2,8
BDC-12/55-7/24-A	Diámetro único con Alambre Guía (Precargado)	12	7	55	2400	2,8
BDC-16/55-7/24-A	Diámetro único con Alambre Guía (Precargado)	16	7	55	2400	2,8
BDC-18/55-7/24-A	Diámetro único con Alambre Guía (Precargado)	18	7	55	2400	2,8



SOLUCIONES SIMPLES

DISPOSITIVO PARA INFLADO DE BALONES



El dispositivo para inflado de Micro-Tech fue diseñado para acomodar manos más pequeñas; incluye una palanca de bloqueo.

- La palanca de bloqueo se controla con la mano.
- El émbolo se mueve para purgar, inflar o crear un vacío.
- El dial luminoso muestra la presión en atmósferas en la escala exterior para una clara visualización.
- La jeringa de un solo uso de 60mL incluye una marca de llenado para los balones Micro-Tech.



BLOQUEADO



DESBLOQUEADO

ESPECIFICACIONES

Ref	Descripción	Empaque
BID-15-60-01	Dispositivo para inflado de balones Micro-Tech con palanca y jeringa de 60ml	1/Caja



RESECCIÓN Y RECUPERACIÓN

POLIPECTOMÍA-EMR-ESD

ENDO INK

BLUE BEACON

BLUEBOOST

ASAS FRÍAS

ASAS PARA POLIPECTOMÍA

LESION HUNTER

EDGEHOG

EXTRACCIÓN

ENTRAP

PINZAS PARA EXTRACCIÓN

RECUPERACIÓN DE PÓLIPOS



ENDOINK™

TATUAJE ENDOSCÓPICO

EndoINK™ es un líquido de un solo uso diseñado para marcar endoscópicamente lesiones en el tracto gastrointestinal. Desarrollado con un líquido de suspensión que contiene partículas de carbono altamente purificadas, EndoINK™ crea un marcador para facilitar la extracción y el examen quirúrgico.

- Tatuaje endoscópico para el marcado fiable de lesiones y áreas de referencia en el tracto gastrointestinal.
- Líquido estéril suministrado en una jeringa de 10ml con tapa para uso en un solo paciente.



ESPECIFICACIONES

Ref	Descripción	Empaque
ENK10	Marcador Endoscópico EndoINK™, 10ml, Líquido Estéril	5/Caja



AZUL VERDADERO

MARCADOR G.I. BLUE BEACON™

Utilizado ocasionalmente como colorante alimentario, el índigo carmín puede ser útil en los procedimientos gastrointestinales como tinción de contraste para marcar o resaltar temporalmente el tejido. El marcador Blue Beacon GI puede diluirse para mezclarse con la solución de irrigación, rociarse o inyectarse alrededor de la zona de interés.

La solución de índigo carmín al 0,4% se suministra estéril en una cómoda jeringa de 5ml con cierre luer, 5 jeringas por caja.



ESPECIFICACIONES

Ref	Descripción	Empaque
P-DYZ-04-05	Marcador gastrointestinal Blue Beacon Jeringa de 5ml índigo carmín 0,4% Estéril	5/Caja



UNA CLARA DIFERENCIACIÓN

SOLUCIÓN INYECTABLE

SUBMUCOSA BLUEBOOST™

BlueBoost™ es un agente de elevación que dura. Una vez inyectado en el espacio submucoso, BlueBoost™ añade eficacia a los procedimientos GI al separar las capas del tracto gastrointestinal y ayudar a delinear el margen alrededor de la lesión. Esta solución viscosa premezclada de color azul cielo intenso está diseñada para ayudar a la extirpación de pólipos, adenomas y otras lesiones.

- Se presenta en jeringas precargadas y listas para usar.
- Supera a la solución salina y crea una elevación fiable que le ahorrará tiempo.



ESPECIFICACIONES

Ref	Descripción	Empaque
SML10	Solución inyectable submucosa BlueBoost™, 10ml	12/Caja




ASAS PARA POLIPECTOMÍA

SUS ASAS DIARIAS

Una línea completa de asas con:

- Modelos de alambre firme y blando.
- Formas hexagonales y redondas.
- Un modelo especial 3 en 1.

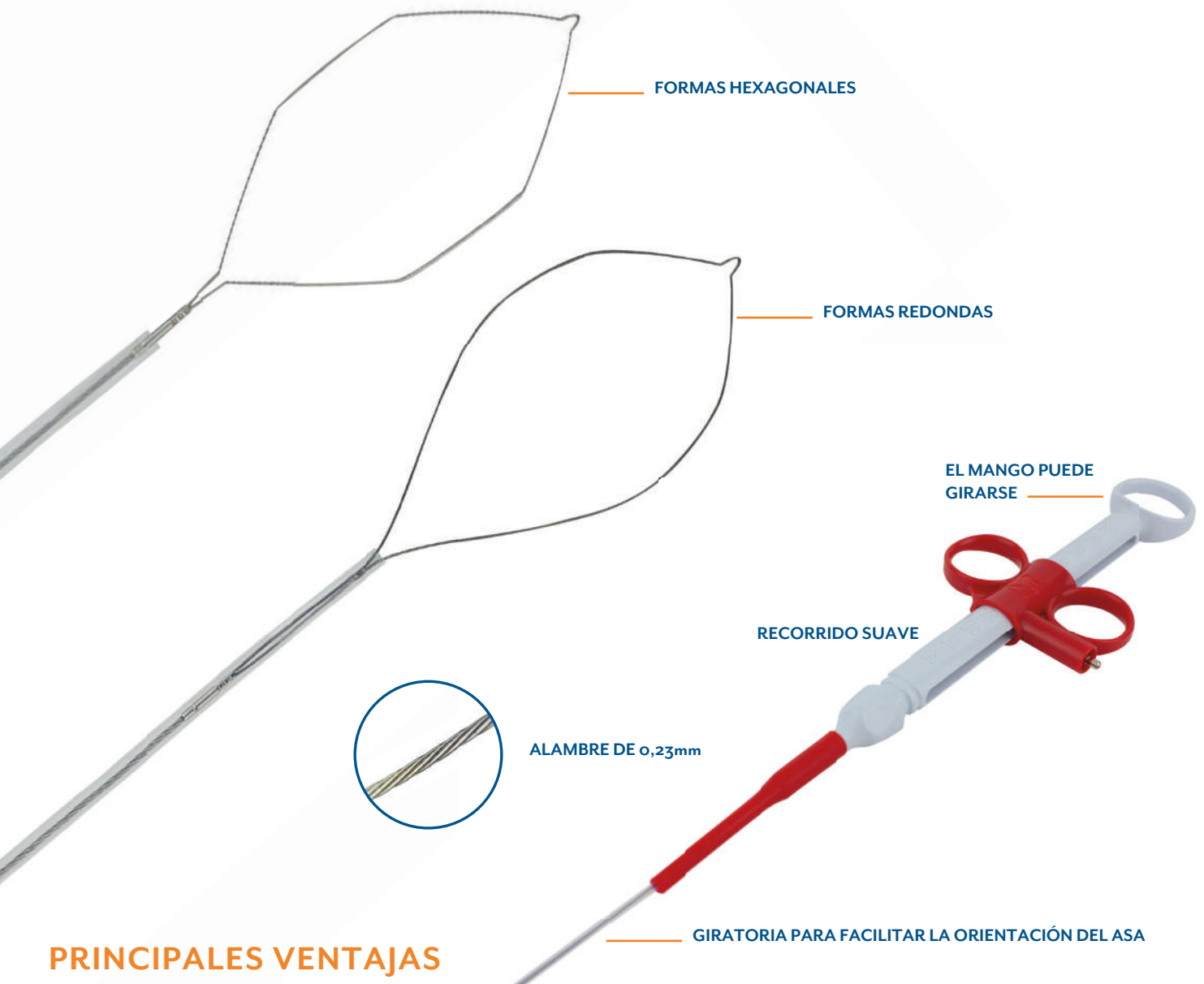

PRINCIPALES VENTAJAS

ALAMBRE TRENZADO

El alambre trenzado combina las características de captura de tejido de un asa firme con la flexibilidad y el despliegue suave de un asa blanda. Adecuado para el uso diario en instalaciones que buscan minimizar el inventario.

DIFERENTES FORMAS

La forma ovalada, hexagonal o una combinación especial que presenta 3 tamaños en una sola asa proporcionará soluciones versátiles a los usuarios.

VARIOS TAMAÑOS

Desde 10mm hasta 30mm, un tamaño para cada situación.



ESPECIFICACIONES

ALAMBRE FIRME

Ref		Forma del asa	Diámetro del asa (mm)	Diámetro de la camisa (mm)	Tamaño del canal (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque
PFS01-01023230	✓	Oval	10	2,3	≥2,8	2300	10/Caja
PFS01-01523230	✓	Oval	15	2,3	≥2,8	2300	10/Caja
PFS01-02023230		Oval	20	2,3	≥2,8	2300	10/Caja
PFS01-02423230		Oval	24	2,3	≥2,8	2300	10/Caja
PFS01-03023230		Oval	30	2,3	≥2,8	2300	10/Caja
PFS01-03623230		Oval	36	2,3	≥2,8	2300	10/Caja
PFS01-11523230		Hexagonal	15	2,3	≥2,8	2300	10/Caja
PFS01-12423230		Hexagonal	24	2,3	≥2,8	2300	10/Caja
PFS01-33023230		3 en 1	10/20/30	2,3	≥2,8	2300	10/Caja

ALAMBRE BLANDO

Ref		Forma del asa	Diámetro del asa (mm)	Diámetro de la camisa (mm)	Tamaño del canal (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque
PFS02-01023230		Oval	10	2,3	≥2,8	2300	10/Caja
PFS02-01523230		Oval	15	2,3	≥2,8	2300	10/Caja
PFS02-02023230		Oval	20	2,3	≥2,8	2300	10/Caja
PFS02-02423230		Oval	24	2,3	≥2,8	2300	10/Caja
PFS02-03023230		Oval	30	2,3	≥2,8	2300	10/Caja



ASA FRÍA DIAMOND CUT™

En Micro-Tech Endoscopy se ha desarrollado el asa fría Diamond Cut™ para la resección de pólipos diminutos. Cuenta con:

- Alambre de corte fino tipo guillotina
- Disponible en dos tamaños

ASA EN FORMA DE DIAMANTE



ALAMBRE
DE 0,23mm

PRINCIPALES VENTAJAS

ASA FRÍA DEDICADA

Diseñada específicamente para la resección de pólipos diminutos utilizando una técnica de asa fría, el bucle en forma de diamante y el alambre flexible capturan los pólipos más pequeños con facilidad.

ALAMBRE FINO

El fino alambre de corte de 0,23mm proporciona un corte de guillotina que reduce la fuerza necesaria para realizar la resección y puede limitar los desgarros o enganches.

CÓMODO MANGO ERGONÓMICO

El mango ergonómico de tres anillos, que se adapta a varios tamaños de mano, presenta un recorrido corto y un agarre cómodo. El catéter rígido proporciona apoyo para un corte suave y sin esfuerzo.



ESPECIFICACIONES

Ref		Descripción	Diámetro del asa (mm)	Diámetro de la camisa (Fr)	Longitud de trabajo (cm)	Tamaño mínimo de canal (mm)	Empaque
CS3-11023230	✓	Forma de diamante y alambre fino	10	7	230	2,8	10/Caja
CS3-11523230		Forma de diamante y alambre fino	15	7	230	2,8	10/Caja

Ref		Descripción	Diámetro del asa (mm)	Longitud de trabajo (cm)	Tamaño mínimo de canal (mm)	Empaque
NPFS02-11523230		Asa firme para polipectomía	15	230	2,3	10/Caja
NRPFS02-01023230		Asa trenzada giratoria para polipectomía	10	230	2,3	10/Caja
NRPFS02-03023230		Asa trenzada giratoria para polipectomía	10	230	2,3	10/Caja



CORTE DE PRECISIÓN ASA FRÍA LESIONHUNTER™

El asa fría LesionHunter™ cuenta con un fino alambre de nitinol giratorio que mantiene la forma ovalada corte tras corte. Con esta asa fría, se obtiene un corte limpio y preciso.

- Reducción del tejido que se escapa - El alambre fino puede reducir el riesgo de generar una muestra que se escape, lo que facilita la localización del tejido al final de la resección.
- Alambre de nitinol fino - Este material de alambre proporciona durabilidad en la forma con un diámetro de 0.18mm para un corte aún más limpio.
- Camisa interna en espiral - El catéter metálico en espiral crea una mayor estabilidad para la acción de corte tipo guillotina del alambre.



PRINCIPALES VENTAJAS

ASA FRÍA DEDICADA

Diseñada específicamente para la resección de pólipos mediante la técnica de asa fría.

ALAMBRE FINO DE NITINOL

Este material de alambre proporciona durabilidad en la forma con un diámetro de 0.18mm para un corte aún más limpio.

CAMISA INTERNA EN ESPIRAL

El catéter metálico en espiral crea una mayor estabilidad para la acción de corte tipo guillotina del alambre.



ESPECIFICACIONES

Ref		Forma del asa	Diámetro del asa (mm)	Diámetro de la camisa (mm)	Tamaño del canal (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque
CS2-21023231	✓	Oval	10	2,3	≥2,8	2300	10//Caja
CS2-21523231		Oval	15	2,3	≥2,8	2300	10//Caja
CS2-22023231		Oval	20	2,3	≥2,8	2300	10//Caja



RESECCIÓN DE PRECISIÓN ASA CALIENTE EDGEHOG™

EdgeHog™ es nuestra asa caliente más sensible con un alambre plano de monofilamento que fue diseñado para cortar tejido con precisión y facilidad. También cuenta con un alambre ultra rígido con una silueta redondeada y es giratoria, ideal para procedimientos avanzados de RME (Resección Mucosa Endoscópica).

DESlizamiento REDUCIDO

El alambre rígido de monofilamento se adentra en el tejido y el alambre plano se asienta perpendicular al plano de corte, lo que permite un agarre y sujeción máximos del tejido. El diseño proximal en "forma de V" del alambre proporciona estabilidad para que el asa permanezca plana y pueda enganchar el tejido. El resultado es un menor deslizamiento al cerrarse sobre el tejido.

ALAMBRE PLANO DE MONOFILAMENTO

El alambre de monofilamento conduce la energía de manera eficiente. Esto ayuda al asa a resecar el tejido de forma eficaz, proporcionando un margen limpio con un efecto de cauterización ultrafino que puede reducir el daño térmico al tejido sano.

ESPECIFICACIONES

Ref	Descripción	Díámetro del Asa (mm)	Longitud de trabajo (cm)	Empaque
PS51181	Asa Caliente EdgeHog	20	230	10//Caja



DURADERA Y SUAVE

RED PARA RECUPERACIÓN DE PÓLIPOS ENTRAP™

El sistema de recuperación Entrap™ ofrece una solución rápida y eficaz para la recuperación de pólipos y tejidos para la revisión histopatológica. Con materiales y técnicas de producción avanzadas, el Entrap facilita una mayor consistencia y control del despliegue, posición y cierre de la red.



EL MANGO PUEDE GIRARSE



DESPLAZAMIENTO SUAVE

CATÉTER FIRME

PRINCIPALES VENTAJAS

RED REFINADA

Mayor visibilidad a través del material de la red para la identificación del objetivo de extracción. Suficientemente duradera para un despliegue repetido, pero suave para capturar y preservar suavemente el espécimen.

PROCESOS AVANZADOS

La sutura mínima de la red y la unión de la red reducen los enganches, desgarros y ataduras del material de la red. Esto aumenta la eficiencia y minimiza el tiempo necesario para capturar especímenes de forma fiable.

SUAVE Y RESISTENTE

Un material de catéter más rígido mejora la inserción del dispositivo en el endoscopio y el posicionamiento de la red. La fuerza columnar adicional permite un movimiento suave del espécimen para una captura óptima.



SPECIFICATIONS

Ref		Description	Diámetro del asa (mm)	Diámetro de la camisa (Fr)	Longitud de trabajo (cm)	Tamaño mínimo del canal (mm)	Empaque
NT-E-30/23-P	✓	Red para recuperación de pólipos Entrap™	30	7	230	2,8	10/Caja



PRECISIÓN Y CONTROL

PINZAS PARA EXTRACCIÓN

Pinzas para agarrar de un solo uso para la extracción segura de tejidos o cuerpos extraños.

- Disponibles en diseños de dientes de ratón, cocodrilo y una combinación de ambos
- Mango ergonómico de 3 anillos.
- Camisa con marcadores de entrada y salida.
- Estéril - comodidad de un solo uso.



ESPECIFICACIONES

Ref		Tipo de pinza	Apertura de las mandíbulas (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Tamaño mínimo del canal (mm)	Empaque
NGF33-11023230	✓	Diente de ratón y cocodrilo combinados	8,1	2300	≥2,8	10/Caja
NGF03-11023230		Diente de ratón	6,3	2300	≥2,8	10/Caja
NGF13-11023230		Cocodrilo	8,1	2300	≥2,8	10/Caja



UNA TRAMPA SUPERIOR PARA PÓLIPOS

PROTRAP LUMA



La trampa para pólipos en línea ProTrap Luma™ consta de una manguera de conexión entre el endoscopio y el succionador, un cuerpo de trampa, una bandeja para recolectar la muestra y una barra luminosa. Su diseño único ofrece la posibilidad de recuperar la muestra sin necesidad de tocarla. La bandeja para muestras puede extraerse y colocarse directamente en el frasco porta muestras, lo que minimiza la manipulación y los riesgos asociados. Hay bandejas adicionales disponibles según sea necesario, y el colector se complementa con una barra luminosa para facilitar su uso en condiciones de baja iluminación..

- La barra luminosa, brillante y duradera, ayuda a la visualización durante la recuperación.
- Toda la bandeja cabe dentro del frasco porta muestras.
- Lupa incorporada para facilitar la visualización de la muestra.



ESPECIFICACIONES

Ref	Description	Empaque
BBPA00001	Trampa para pólipos en línea ProTrap Luma	25/Caja



HEMOSTASIS

AGUJAS PARA INYECCIÓN

CLIPS PARA HEMOSTASIA

SURECLIP

LOCKADO

LIGADORES MULTIBANDA

SUREFIRE



INNOVACIÓN INTELIGENTE

AGUJA PARA INYECCIÓN

Diseñada para uso con una sola mano, el innovador diseño limita el movimiento accidental de la aguja durante su inserción y extracción. El mecanismo de trinquete patentado proporciona una confirmación audible del despliegue y minimiza el rebote de la aguja. Un botón de liberación rápida devuelve la aguja completamente a la camisa.

El cilindro metálico empotrado en el extremo y la inserción firme del catéter garantizan el desempeño de la aguja a través de varias posiciones del endoscopio.



PRINCIPALES VENTAJAS

MANEJO CON UNA SOLA MANO

El manejo ergonómico con una sola mano permite un movimiento seguro de la aguja y una rápida retracción de la misma.

DISEÑO DE TRINQUETE PATENTADO

Proporciona una confirmación audible y un bloqueo seguro de la aguja durante el uso. A medida que la aguja avanza, el trinquete ofrece una respuesta táctil y ayuda a reducir el rebote de la aguja.

PUNTA DE BISEL CORTO

Las agujas presentan una punta más corta con tres biseles, diseñada para mejorar la precisión.



ESPECIFICACIONES


Ref		Calibre de la aguja	Longitud de aguja (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Diámetro de la camisa (mm)	Tamaño mínimo del canal (mm)	Empaque
IN12-224232302	✓	22	4	2300	2,3	2,8	10/Caja
IN12-225232302		22	5	2300	2,3	2,8	10/Caja
IN12-254232302		25	4	2300	2,3	2,8	10/Caja
IN12-255232302		25	5	2300	2,3	2,8	10/Caja
IN12-195231802		19	5	1800	2,3	2,8	10/Caja



HEMOSTASIA TÉRMICA DIRIGIDA

ENSURE™ - PINZA GIRATORIA DE 360° PARA COAGULACIÓN

- EnSure™ detiene la hemorragia de los vasos sangrantes de manera confiable sin afectar al tejido circundante.
- Los vasos sangrantes pueden abordarse con precisión gracias a la confiable rotación bidireccional de 360° y a una selección de dos tipos de mandíbulas para satisfacer la necesidad clínica: Cónica y Estriada. Ambos tipos tienen mandíbulas con dientes diseñados para evitar el deslizamiento durante la coagulación térmica.

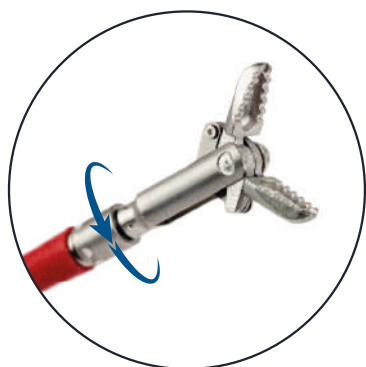

Rotación bidireccional de 360° para alcanzar las hemorragias.

PRINCIPALES VENTAJAS

MANGO ERGONÓMICO

Mango de tres anillos con revestimiento para mejorar el agarre.

ROTACIÓN 1:1

Rotación bidireccional de 360° para alcanzar las hemorragias.

MARCADO

Marcas en el catéter para ayudar a determinar la longitud de inserción dentro del endoscopio.




ESPECIFICACIONES

Ref	Descripción	Tipo de mandíbulas	Longitud de trabajo (mm)	Diámetro exterior (mm)	Abertura (mm)	Empaque
CF-165-A ✓	Pinzas para coagulación EnSure™	Mandíbulas cónicas	1650	2,3	6,5	10/Caja
CF-165-B	Pinzas para coagulación EnSure™	Mandíbulas estriadas	1650	2,3	6,5	10/Caja
CF230-A	Pinzas para coagulación EnSure™	Mandíbulas cónicas	1650	2,7	6,5	10/Caja
CF230-B	Pinzas para coagulación EnSure™	Mandíbulas estriadas	1650	2,7	6,3	10/Caja



Mango ergonómico de tres anillos con revestimiento para mejorar el agarre.

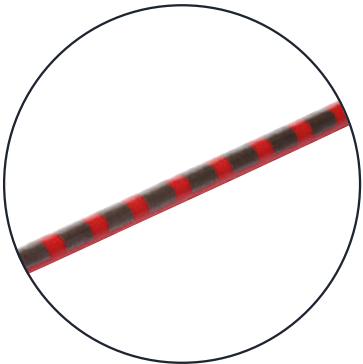

Marcas en el catéter para ayudar a determinar la longitud de inserción dentro del endoscopio.

COLOQUE EL CLIP CON CONFIANZA

SURECLIP™

Los clips tienen que ser fiables. Tienen que ser precisos.

Tienen que permitirle la flexibilidad de reposicionar o rotar tanto como sea necesario para ofrecer mejores resultados, en varias posiciones del endoscopio.



PRINCIPALES VENTAJAS

REPOSICIÓN

El diseño único de SureClip™ permite abrir y cerrar las mandíbulas antes de la colocación. Poder reposicionar un clip puede ayudar a mejorar la precisión de la colocación.

ROTACIÓN FIABLE

SureClip™ puede girarse, lo que ayuda a proporcionar la orientación correcta para la aproximación de tejidos o el cierre de defectos. El mango para rotación del SureClip™ mejora tanto el rendimiento como la experiencia del usuario.




VÁSTAGO CORTO

Un vástago más corto hace que el clip sea menos molesto, y mejora la visualización de la zona objetivo, especialmente cuando se colocan varios clips muy cerca.



ESPECIFICACIONES

Ref	Descripción	Ancho de apertura (mm)	Diámetro de camisa (mm)	Longitud de trajo (mm)	Tamaño mínimo de canal (mm)	Empaque
ROCC-C-26-235-C	SureClip™- mini	8	2,6	2350	2,8	10/Caja
ROCC-D-26-235-C	SureClip™	11	2,6	2350	2,8	10/Caja
ROCC-F-26-235-C ✓	SureClip™- plus	16	2,6	2350	2,8	10/Caja

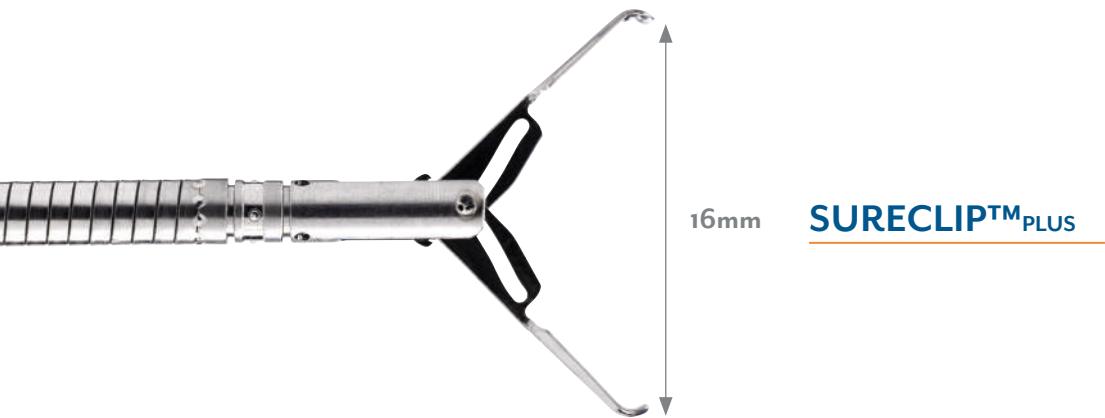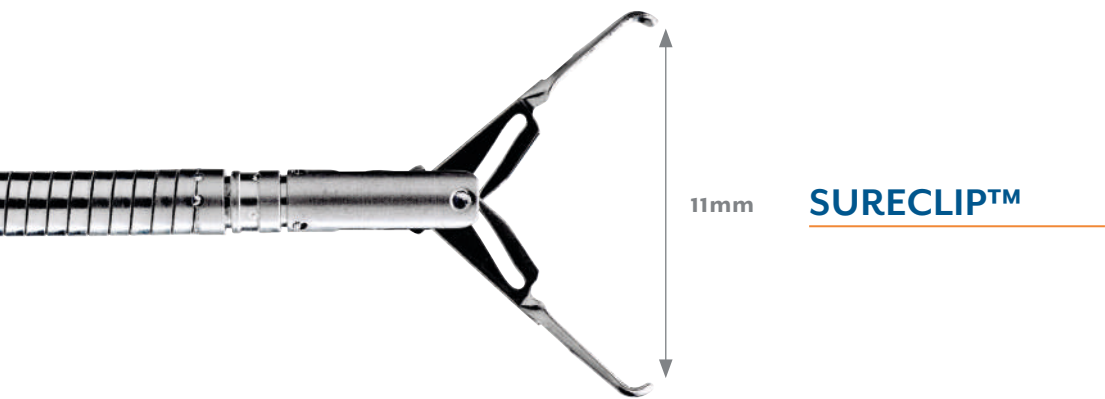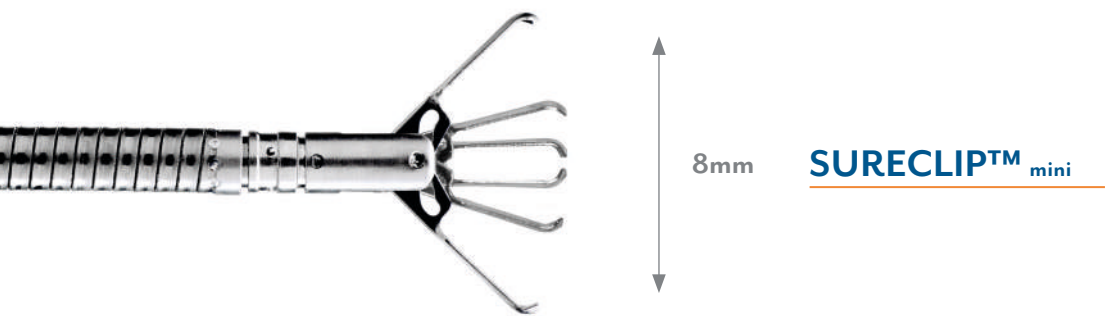

AGARRE MÁS FUERTE, MÁS CONTROL

CLIP PARA HEMOSTASIA LOCKADO™

Los clips para hemostasia deben proporcionar exactitud, fiabilidad y una funcionalidad precisa. Lockado™ permite la apertura y el cierre sin restricciones, por lo que puede reposicionarse hasta alcanzar la posición deseada.

Con dos conjuntos de dientes atraumáticos opuestos en los brazos del clip, Lockado™ ofrece un agarre fiable y seguro para un rendimiento constante. Respaldado por el comprobado sistema de aplicación de clips de Micro-Tech Endoscopy, el clip Lockado proporciona una fiabilidad y un manejo del tejido excepcionales.


- El estilo de la mandíbula funciona para múltiples aplicaciones clínicas.
- Puede utilizarse con un endoscopio de visión lateral.
- El vástago más corto hace que los clips sean menos molestos.
- Variedad de tamaños: 11mm, 16mm y el NUEVO con apertura de 22mm.
- Indicados para el anclaje de sondas de alimentación yeyunales.




ESPECIFICACIONES

Ref		Ancho de apertura(mm)	Diámetro de la camisa (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Tamaño mínimo del canal (mm)	Empaque
LOCK-D-26-235-C-N	✓	11	2,6	2350	2,8	10/Caja
LOCK-F-26-235-C-N	✓	16	2,6	2350	2,8	10/Caja
LOCK-G-26-235-C-N		22	2,6	2350	2,8	10/Caja

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

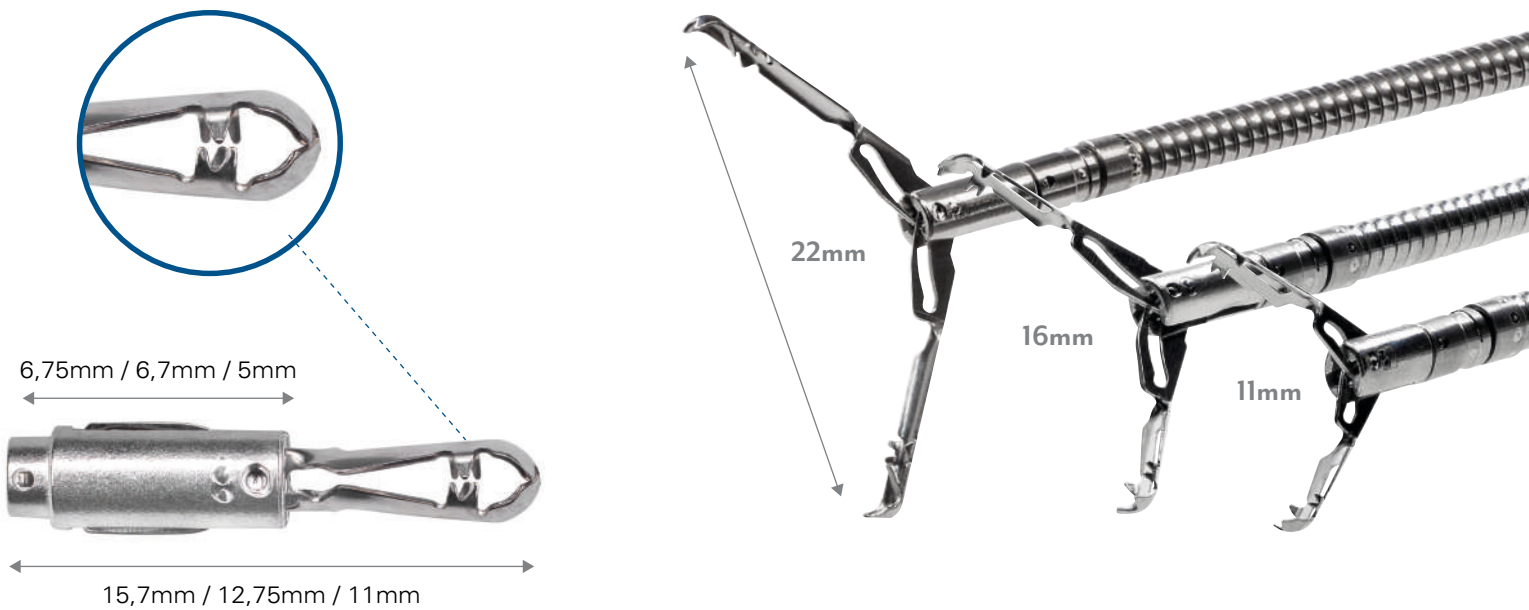

DIENTES ATRAUMÁTICOS

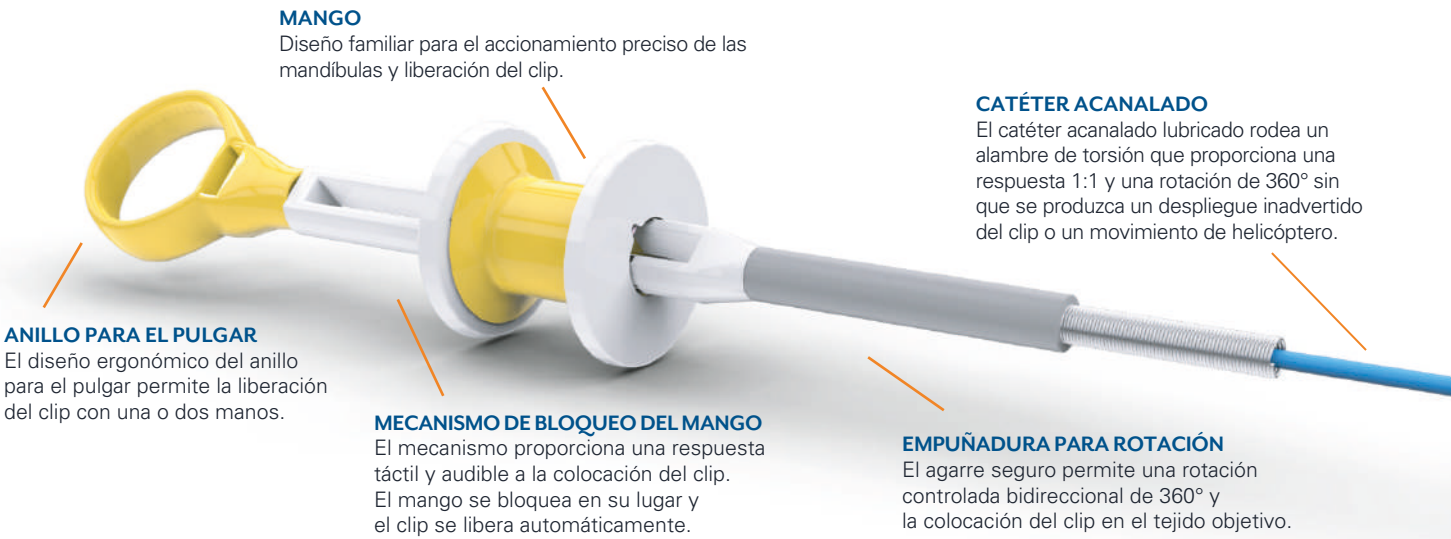

LIGADURA EFICAZ

LIGADORES MULTIBANDA

La ligadura endoscópica ha demostrado ser un tratamiento eficaz y sencillo para las várices esofágicas.



VERSIONES DISPONIBLES
CON Y SIN LÁTEX

PRINCIPALES VENTAJAS

SEGURIDAD ANTE TODO

Se entrega estéril y hay disponible una versión sin látex.

6 Y 7 BANDAS

Ambas versiones están disponibles para satisfacer las necesidades de cualquier usuario.

FÁCIL DE USAR

Sistema intuitivo, fácil de montar y utilizar.

ESPECIFICACIONES

Ref		Descripción	Ø del endoscopio (mm)	Color de banda	Empaque
MBLS-6F		6 bandas látex	9,4 - 13,0	Azul/Transparente	1/Caja
MBLS-7F-NL	✓	7 bandas - Sin látex	9,4 - 13,0	Amarillo/Negro	1/Caja



SUREFIRE™

CONJUNTO DE LIGADORES MULTIBANDA OVER-THE-SCOPE

Cuando el tiempo y el control son críticos, los médicos necesitan una solución de ligadura que sea intuitiva, confiable y lista para usar.

El Conjunto de ligadores multibanda SureFire™ es un sistema pre-cargado, over-the-scope, diseñado para facilitar una colocación segura de las bandas, manteniendo libre el canal de trabajo del endoscopio.



PRINCIPALES VENTAJAS

LISTO PARA USO

LIBERACIÓN CONSISTENTE
DE LAS BANDAS

ACTIVACIÓN QUE
SE PUEDE OÍR Y SENTIR



RESPUESTA AUDIBLE Y TÁCTIL

Proporciona un clic audible y táctil, permitiendo que el médico escuche y sienta la liberación de la banda.

FUNCIÓN DE PRE-TENSADO

Mantiene una tensión constante del cable durante la colocación, favoreciendo una activación controlada y una visualización clara del procedimiento.

INDICACIÓN DE NUMERACIÓN DE BANDAS

Numeración clara en el mango que permite identificar fácilmente qué banda está en uso, favoreciendo una colocación controlada y secuencial de las bandas.

CAMPO VISUAL DESPEJADO

Diseñado para mantener un campo visual claro durante la colocación de las bandas, sin obstruir el área principal de visualización.

FUNCIÓN DE PRE-TENSION

Mantiene una tensión constante del cable durante la colocación, favoreciendo una activación controlada y una visualización clara del procedimiento.

ESPECIFICACIONES

Ref	Descripción	Diámetro (mm)	Canal de trabajo (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque
MBLS-6-NL-S	6 bandas de goma sintética	9.5-11	2.8	1100	1/Caja
MBLS-7-NL-S	7 bandas de goma sintética	9.5-11	2.8	1100	1/Caja

PREVENCIÓN DE INFECCIONES

VÁLVULAS DESECHABLES PARA ENTRADA DEL CANAL
PROTECTORES BUCALES PARA EL ENDOSCOPIO
CEPILLOS PARA LIMPIEZA



PREVENCIÓN DE INFECCIONES CON PROTECTORES BUCALES DESECHABLES PARA EL ENDOSCOPIO

Los protectores bucales para el endoscopio de Micro-Tech ofrecen comodidad y protección durante los procedimientos endoscópicos superiores.



PRINCIPALES VENTAJAS

DISEÑO SUPERIOR

Superficie lisa para mejorar la comodidad del paciente.

PRÁCTICO

Aberturas grandes y flexibles que permiten el paso del endoscopio y la ayuda de los dedos simultáneamente.

CORREA SIN LÁTEX

La correa de tejido elástico evita que se tire del pelo del paciente.

ESPECIFICACIONES

Ref	Descripción	Empaque
AC01-103.A 	Adulto	100/Caja
AC01-103.P	Pedriátrico	100/Caja



PREVENCIÓN DE INFECCIONES CON CEPILLOS DESECHABLES PARA LIMPIEZA

El juego de cepillos para limpieza de Micro-Tech incluye todos los cepillos necesarios para una limpieza a fondo y fácil del endoscopio.

Contiene un cepillo para limpieza para los canales del endoscopio y un cepillo para limpieza de doble cabezal para los orificios de ventilación y los puertos de las válvulas.

PRINCIPALES VENTAJAS

PUNTA DE BOLA

Evita que el cepillo dañe el endoscopio.

CÓNICO

La forma cónica ayuda a una limpieza más profunda.

2 en 1

Todo lo que necesita con un cepillo para el canal y un cepillo doble corto en el mismo paquete

ESPECIFICACIONES

Ref	Descripción	Ø del catéter (mm)	Longitud total (mm)	Ø de los cepillos (mm)	Longitud del cepillo (mm)	Empaque
CB18-T5050/23-B	✓ Kit compuesto por					100/Caja
	Cepillo para el canal	1,8	2300	5-7 doble corto	20/20	
	Cepillo para las válvulas	1,3	-	5/12	20/40	



PREVENCIÓN DE INFECCIONES

VÁLVULAS DESECHABLES PARA ENTRADA DEL CANAL

La válvula desechable para entrada de canal se utiliza para cubrir la apertura del canal para instrumentación de los endoscopios gastrointestinales.

Su diseño único ofrece un mejor rendimiento de la válvula al minimizar las fugas y ayudar a preservar la insuflación para mantener una visualización adecuada.



PRINCIPALES VENTAJAS

SISTEMA DE DOBLE VÁLVULA

Minimiza las fugas y evita las salpicaduras.

SELLADO MEJORADO

Evita fugas y desplazamientos.

SELLO INTERNO TIPO EMBUDO

Se flexiona con los accesorios insertados sin dejar espacios.

ESPECIFICACIONES

Ref	Descripción	Empaque
AC03-102.O ✓	Azul, compatible con los endoscopios Olympus/Fujifilm	100/Caja
AC03-102.P	Rojo, compatible con los endoscopios Pentax	100/Caja



STENTS DE NITINOL

STENTS ESOFÁGICOS

STENTS DUODENALES

STENTS DE COLON


STENTS BILIARES

STENTS PARA PSEUDOQUISTES PANCREÁTICOS


COLOCACIÓN PRECISA STENTS ESOFÁGICOS SEGMENTADOS

Es esencial colocar el stent de manera precisa y mantener la posición durante todo el proceso de colocación. Micro-Tech Endoscopy cuenta con más de dos décadas de experiencia en la fabricación de stents esofágicos asequibles y de alta calidad. Nuestra endoprótesis esofágica segmentada se ajusta a las estenosis esofágicas de derivación y permite una mayor flexibilidad que puede resultar más cómoda para los pacientes.

El sistema de liberación tiene una punta flexible y cónica para facilitar la colocación a través de estenosis estrechas, mientras que el catéter portador precargado y el mecanismo de mango deslizante proporcionan una colocación perfecta de la endoprótesis en el sitio deseado. Nuestra línea de stents esofágicos combina la flexibilidad y la fuerza radial consistente para ayudar a la resolución de la estenosis.

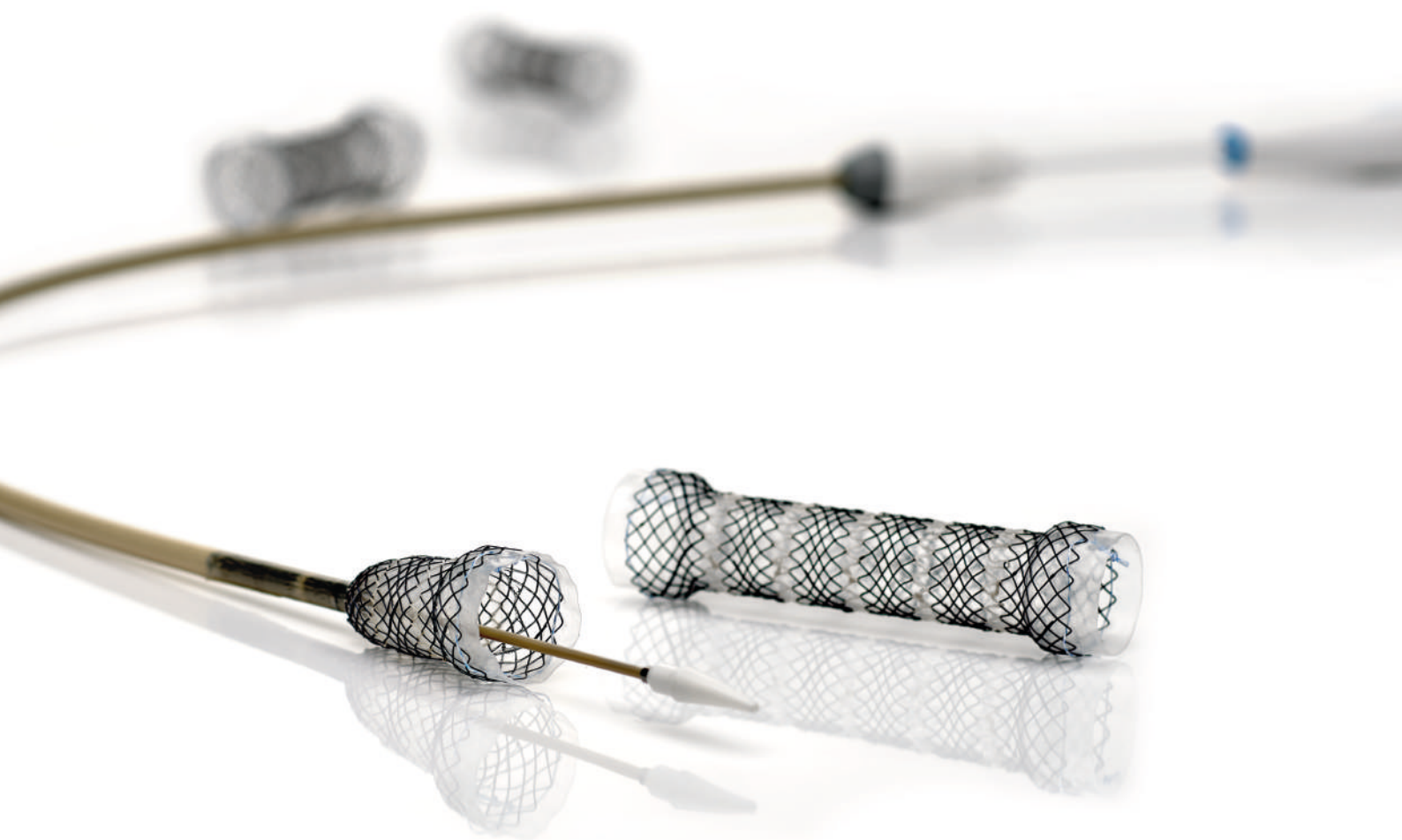

PRINCIPALES VENTAJAS

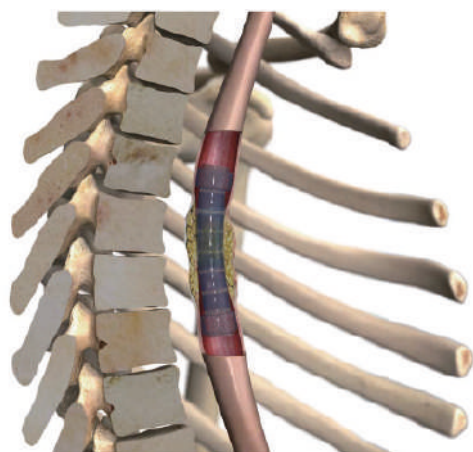

MARCADOR RADIOPACO

Aunque todo el stent es visible bajo fluoroscopia, cada stent tiene varios marcadores radiopacos para ayudar a su colocación precisa.

MOVIMIENTO INDEPENDIENTE

El stent modular segmentado permite un movimiento independiente entre cada sección, lo que maximiza la adaptación con la anatomía curva o tortuosa.

RESISTENCIA A LA MIGRACIÓN

Los extremos acampanados junto con la exclusiva construcción segmentada pueden reducir la migración dentro de la luz del esófago.

HILOS PARA REPOSICIONAMIENTO

Los hilos están situados en los extremos distal y proximal del stent para permitir su reposicionamiento o retirada inmediatamente después de su colocación.



ESPECIFICACIONES

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (cm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque	Reenfundable
NST61-224-18.100	18	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-18.120	18	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-18.160	18	160	24/8	650	1/Caja	SI
NST61-224-20.060	20	60	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-20.100 ✓	20	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-20.120 ✓	20	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-22.100 ✓	22	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-22.120	22	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-22.140	22	140	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST61-224-22.160 ✓	22	160	24/8	650	1/Caja	SI




COLOCACIÓN PRECISA

STENTS ESOFÁGICOS TOTAL Y PARCIALMENTE CUBIERTOS

Es esencial colocar el stent de manera precisa y mantener la posición durante todo el proceso de colocación. El Endoscopio Micro-Tech cuenta con más de dos décadas de experiencia en la fabricación de stents esofágicos de alta calidad y asequibles.

El sistema de despliegue tiene una punta flexible y cónica para facilitar la colocación a través de estenosis estrechas, mientras que el catéter portador precargado y el mecanismo de mango deslizante proporcionan una colocación perfecta del stent en el sitio deseado.

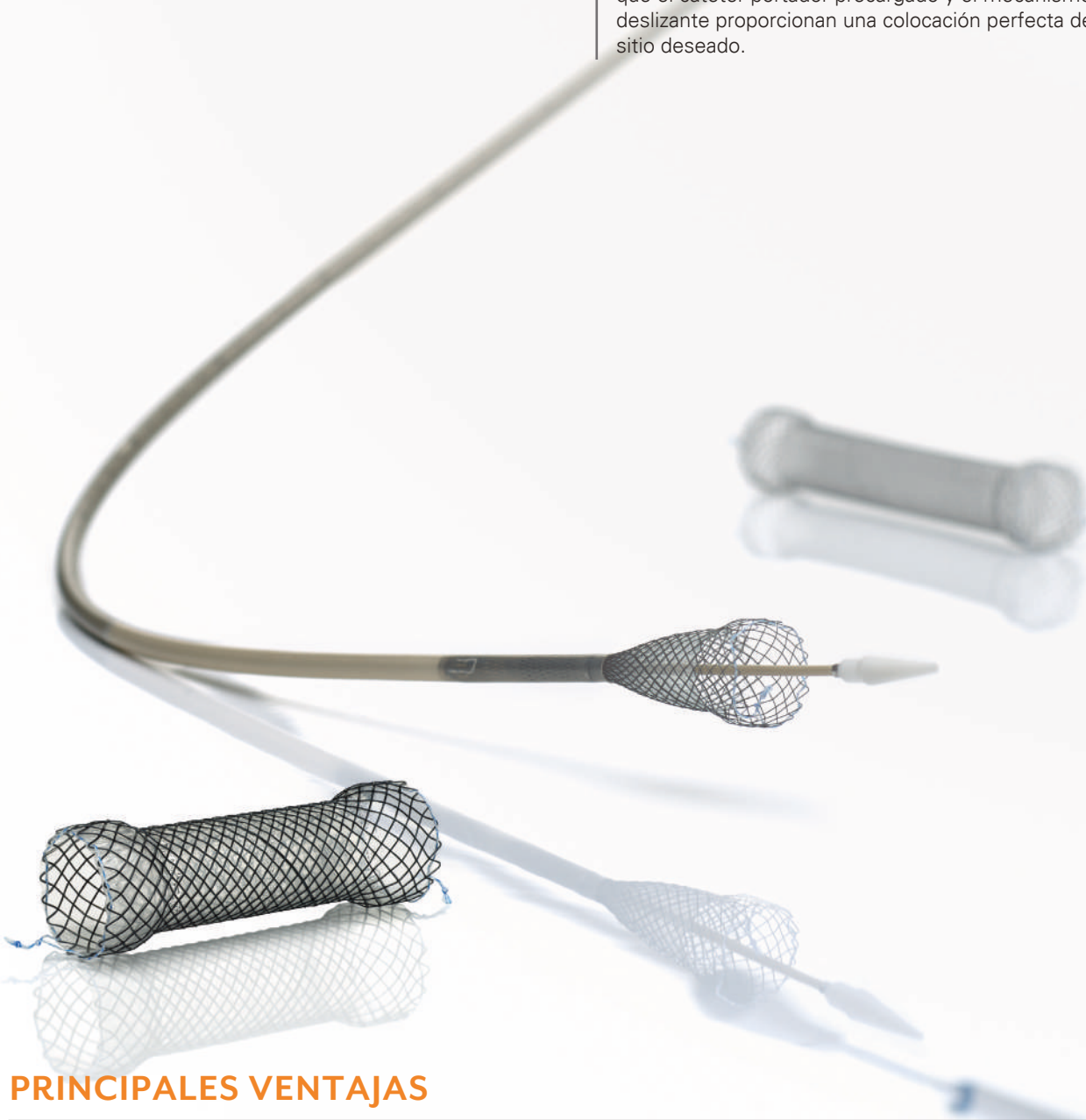

PRINCIPALES VENTAJAS

MARCADORES RADIOPACOS

Aunque todo el stent es visible bajo fluoroscopia de rayos X, cada stent tiene varios marcadores radiopacos para ayudar a su colocación precisa.

FABRICADO CON UN SOLO ALAMBRE

Nuestros stents esofágico total y parcialmente cubiertos están trenzados con un único alambre de Nitinol, lo que reduce el riesgo de fractura en los puntos de conexión.

RESISTENCIA A LA MIGRACIÓN

Los extremos acampanados pueden reducir la migración dentro del lumen esofágico.



ESPECIFICACIONES

COPA DOBLE PARCIALMENTE CUBIERTA

Ref		Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (cm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque	Reenfundable
NST01-222-18.100		18	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-18.120		18	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-18.150		18	150	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-20.080		20	80	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-20.100	✓	20	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-20.120	✓	20	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-20.150		20	150	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-22.080		22	80	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-22.100	✓	22	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-22.120	✓	22	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-22.150	✓	22	150	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-222-24.100		24	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST01-222-24.120		24	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST01-222-24.150		24	150	24/8	650	1/Caja	SI

COPA DOBLE TOTALMENTE CUBIERTA

Ref		Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (cm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque	Reenfundable
NST01-224-18.100		18	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-18.120		18	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-18.150		18	150	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-20.080		20	80	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-20.100	✓	20	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-20.120	✓	20	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-22.100		22	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-22.120		22	120	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-22.150	✓	22	150	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-24.100	✓	24	100	20/6,7	650	1/Caja	SI
NST01-224-24.120		24	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST01-224-24.150		24	150	24/8	650	1/Caja	SI




ESPECIFICACIONES

ANTIRREFLUJO PARCIALMENTE CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (cm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque	Reenfundable
NST21-112-18.100	18	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-18.120	18	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-20.080	20	80	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-20.100	20	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-20.120	20	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-22.100	22	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-22.120	22	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-24.100	24	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-112-24.120	24	120	24/8	650	1/Caja	SI

ANTIRREFLUJO TOTALMENTE CUBIERTO


Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (cm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque	Reenfundable
NST21-114-18.100	18	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-18.120	18	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-20.080	20	80	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-20.100	20	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-20.120	20	120	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-24.100	24	100	24/8	650	1/Caja	SI
NST21-114-24.120	24	120	24/8	650	1/Caja	SI

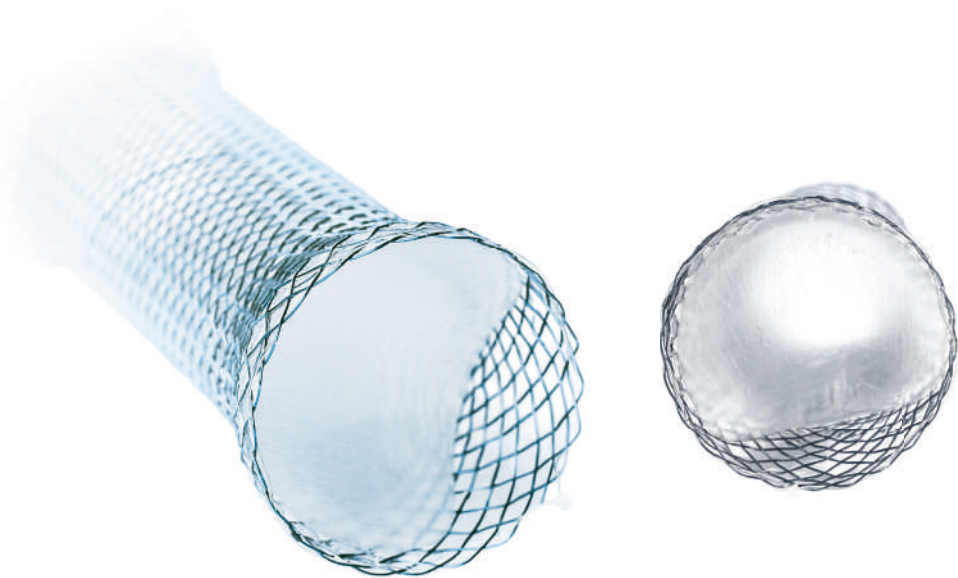

VERSATILIDAD CON STENTS DUODENALES

Los stents duodenales de Micro-Tech Endoscopy se adaptan perfectamente a la anatomía del duodeno gracias a sus extremos esféricos. Cuentan con:

- Versiones no cubiertas, parcialmente cubiertas y totalmente cubiertas disponibles para todas las indicaciones que se necesiten.
- Liberación bajo visión endoscópica, sistema a través del endoscopio.

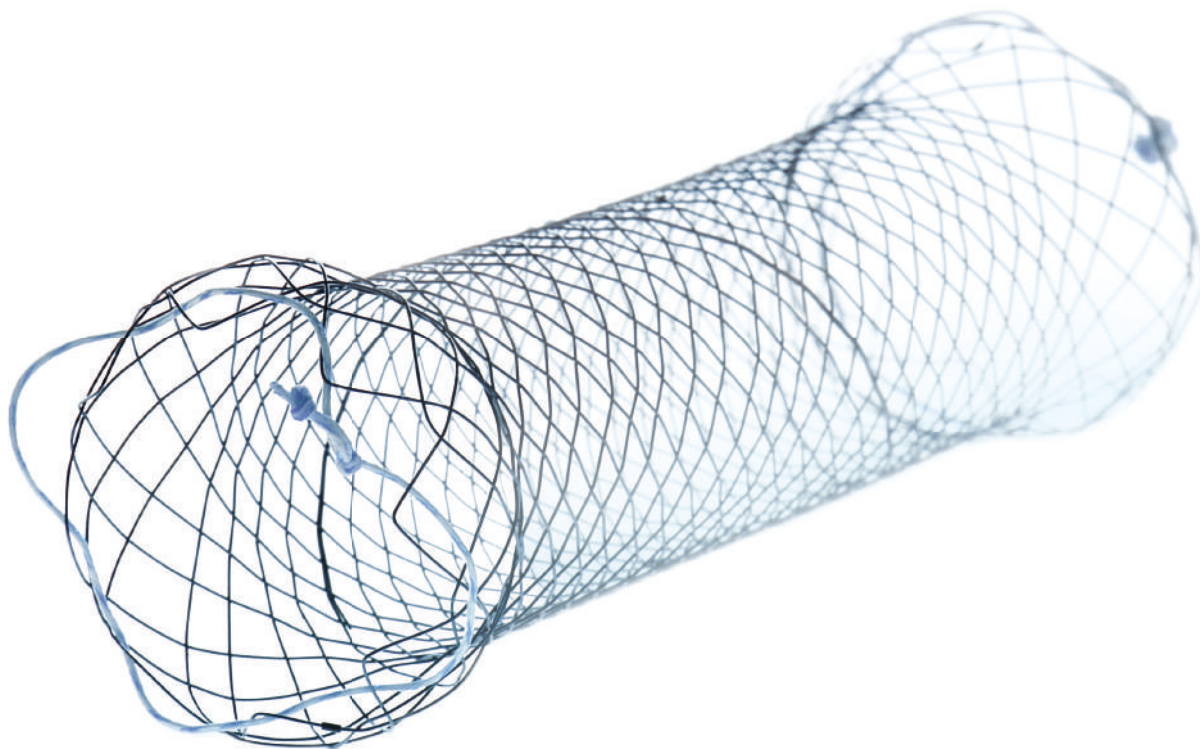

PRINCIPALES VENTAJAS

VERSATILIDAD

Disponible en varios tamaños y modelos.

LIBERACIÓN SEGURA

Se puede controlar tanto por vía endoscópica como por vía fluoroscópica.

HILOS PARA EXTRACCIÓN

Para la extracción y el reposicionamiento.



ESPECIFICACIONES

DUODENAL NO CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST74-331-20.080	20	80	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-20.100	✓ 20	100	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-20.120	✓ 20	120	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-22.080	22	80	10/3,3	1800	NO	1/Caja
NST74-331-24.100	24	100	10/3,3	1800	NO	1/Caja

DUODENAL PARCIALMENTE CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST74-332-20.080	20	80	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-20.100	20	100	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-20.120	✓ 20	120	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja
NST74-332-24.080	24	80	10,5/3,5	1800	NO	1/Caja


DUODENAL TOTALMENTE CUBIERTO

Ref	Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST74-334-20.120	20	120	11/3,7	1800	NO	1/Caja



A TRAVÉS DEL ENDOSCOPIO STENTS COLÓNICOS

La estabilidad posicional es primordial con los stents colónicos. Los stents colónicos de Micro-Tech (a través del endoscopio) son conocidos por su capacidad de anclaje seguro en el interior del intestino y de adaptación óptima a la anatomía y al peristaltismo del colon. La transición desde el cuerpo principal del stent hasta sus extremos esféricos está al ras, lo que garantiza un contacto suave con la pared del colon.

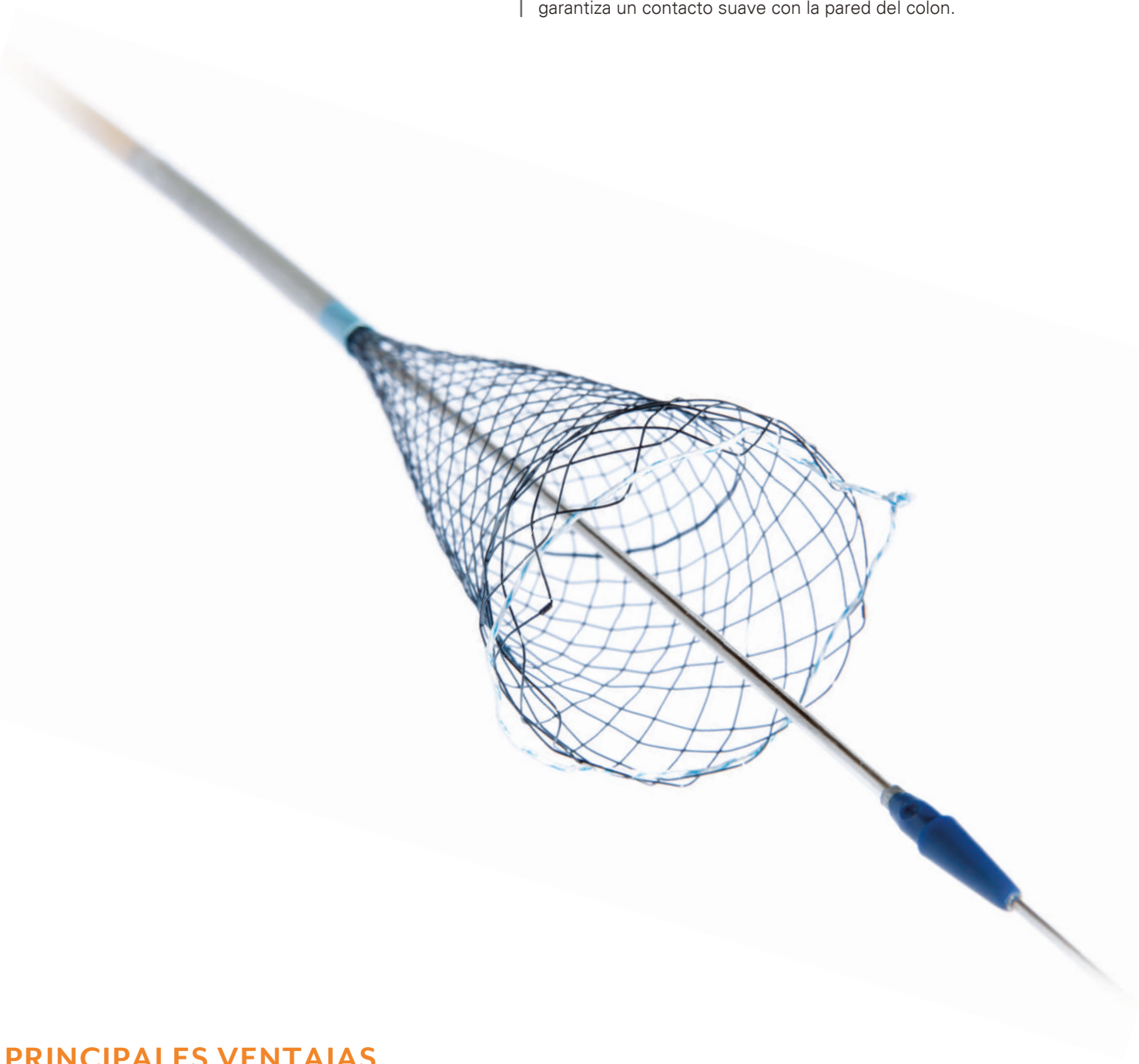

PRINCIPALES VENTAJAS

EXCELENTE ESTABILIDAD POSICIONAL

Diseño anatómico.

TTS - A TRAVÉS DEL ENDOSCOPIO

Puede colocarse a través del endoscopio, bajo visión endoscópica.

HILOS PARA EXTRACCIÓN

Para la extracción y el reposicionamiento.



ESPECIFICACIONES

COLÓNICO NO CUBIERTO

Ref		Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST64-331-24.080		24	80	10/3,3	2300	NO	1/Caja
NST64-331-24.100	✓	24	100	10/3,3	2300	NO	1/Caja
NST64-331-26.080	✓	26	80	10/3,3	2300	NO	1/Caja

COLÓNICO PARCIALMENTE CUBIERTO

Ref		Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST64-332-24.080	✓	24	80	10,5/3,5	2300	NO	1/Caja
NST64-332-24.100	✓	24	100	10,5/3,5	2300	NO	1/Caja

COLÓNICO TOTALMENTE CUBIERTO


Ref		Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST64-334-24.080		24	80	11/3,7	2300	NO	1/Caja
NST64-334-24.100	✓	24	100	11/3,7	2300	NO	1/Caja



EXCELENTE ESTABILIDAD POSICIONAL

STENTS BILIARES

La línea de stents biliares de Micro-Tech Endoscopy está disponible tanto para el sistema de alambre guía largo como para el de alambre guía corto, para satisfacer cualquier necesidad de los usuarios.

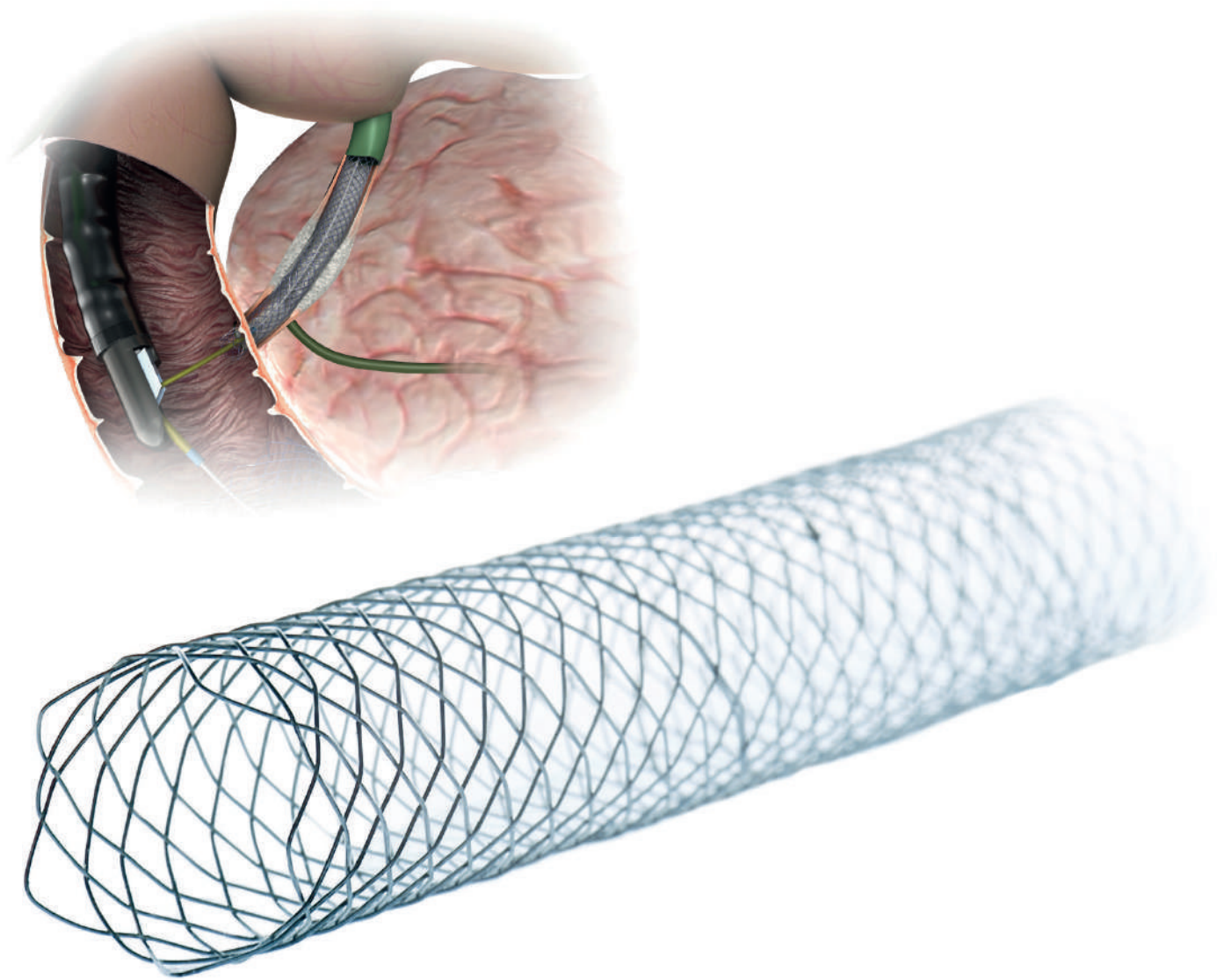

PRINCIPALES VENTAJAS

EXCELENTE ESTABILIDAD POSICIONAL

Diseño anatómico.

TTS - A TRAVÉS DEL ENDOSCOPIO

Puede colocarse a través del endoscopio, bajo visión endoscópica.

HILOS PARA EXTRACCIÓN

Para la extracción y el reposicionamiento.



ESPECIFICACIONES

SISTEMA DE ALAMBRE GUÍA LARGO

Stents biliares no cubiertos

Ref		Diámetro de cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST03-001-10.060		10	60	7,5/2,5	1800	SI	1/Caja
NST03-001-10.080	✓	10	80	7,5/2,5	1800	SI	1/Caja
NST03-001-10.100		10	100	7,5/2,5	1800	SI	1/Caja

Stents biliares parcialmente cubiertos

Ref		Diámetro de cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST03-002-10.060	✓	10	60	8,5/2,8	1800	SI	1/Caja
NST03-002-10.080		10	80	8,5/2,8	1800	SI	1/Caja
NST03-002-10.100		10	100	8,5/2,8	1800	SI	1/Caja

Stents biliares totalmente cubiertos



Ref		Diámetro de cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Reenfundable	Empaque
NST03-004-10.040		10	40	8,5/2,8	1800	NO	1/Caja
NST03-004-10.060	✓	10	60	8,5/2,8	1800	NO	1/Caja
NST03-004-10.080		10	80	8,5/2,8	1800	NO	1/Caja
NST03-004-10.100		10	100	8,5/2,8	1800	NO	1/Caja



SUJECIÓN SEGURA PARA UN DRENAJE FIABLE

STENTS PARA PSEUDOQUISTES PANCRÉATICOS

El diseño del stent de pseudoquiste pancreático de Micro-Tech Endoscopy, con sus formas de paraguas distal y de tulipán proximal, podría reducir el riesgo de una eventual migración hacia el quiste. Su forma de paraguas es atraumática y, por lo tanto, podría evitar una necrosis por contacto con el bazo.

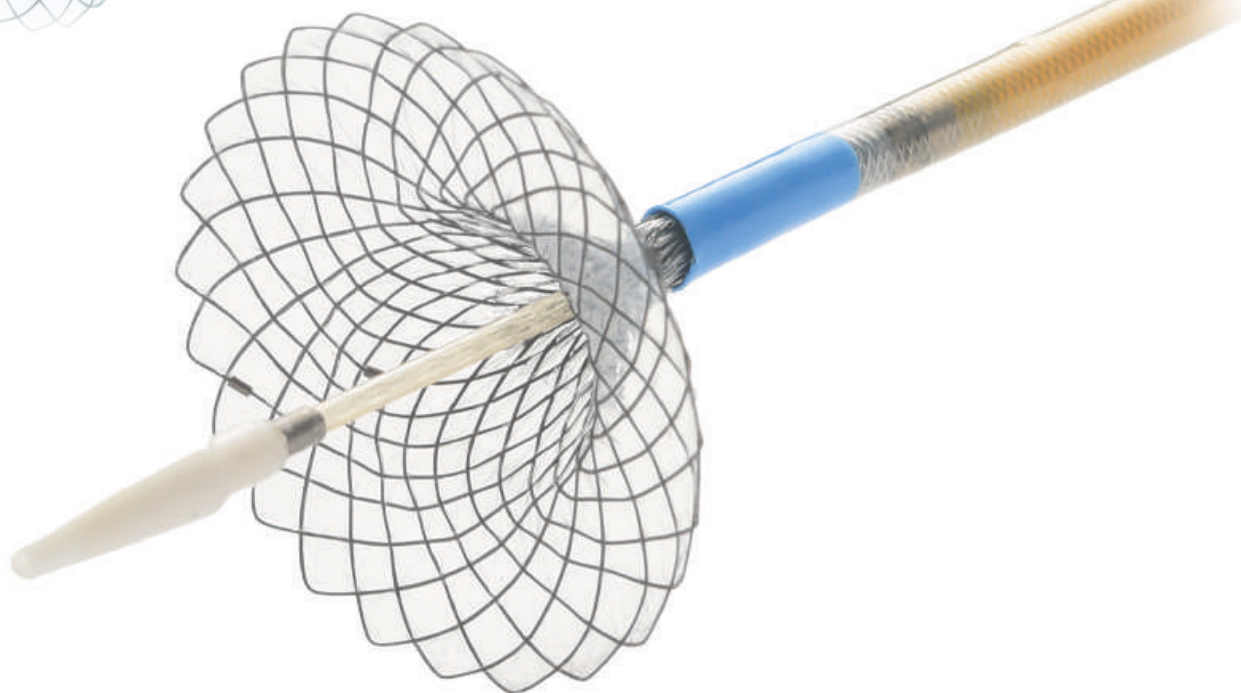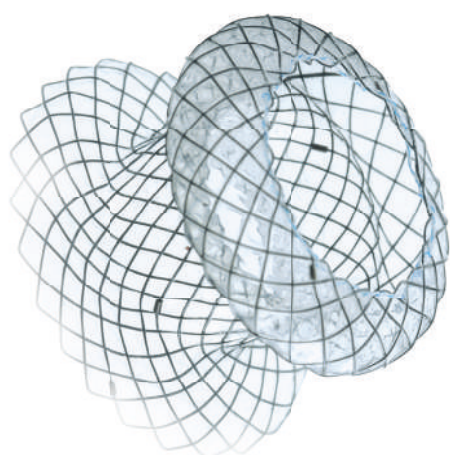

PRINCIPALES VENTAJAS

DISEÑO ANATÓMICO

El borde distal del paraguas se asienta perfectamente en la cavidad del quiste.

TTS - A TRAVÉS DEL ENDOSCOPIO

Su sistema de portador de 3,5 mm de diámetro permite una fácil colocación.

SISTEMA INTUITIVO

Fácil de colocar con apenas unos pocos pasos.



ESPECIFICACIONES

Ref		Diámetro del cuerpo (mm)	Longitud expandido (mm)	Diámetro del catéter (cm)	Longitud de trabajo (mm)	Empaque	Reenfundable
NST33-544-16.015		16	15	10,5/3,5	1800	1/Caja	SI
NST33-544-16.020	✓	16	20	10,5/3,5	1800	1/Caja	SI
NST33-544-16.025		16	25	10,5/3,5	1800	1/Caja	SI
NST33-544-16.030		16	30	10,5/3,5	1800	1/Caja	SI



AGUJAS PARA EUS

FNA

FNB





CONFIABLES Y PRECISAS AGUJAS PARA EUS

Ya sea que se requiera un Ultrasonido Endoscópico para una intervención diagnóstica y terapéutica o para un muestreo histológico, Micro-Tech Endoscopy ofrece opciones clínicas asequibles y de alta calidad que ayudan a realizar un muestreo consistente y un diagnóstico preciso a partir de la adquisición de tejido por Ultrasonido Endoscópico.

La aguja de FNB Trident™, con su exclusivo diseño con núcleo de tres puntas, consigue maximizar el desempeño y permite la adquisición consistente de tejido histológico.

La aguja de FNA Areus™ cuenta con una punta biselada alargada de doble filo para ayudar a la penetración precisa en el área de destino proporcionando un desempeño consistente para la citología.

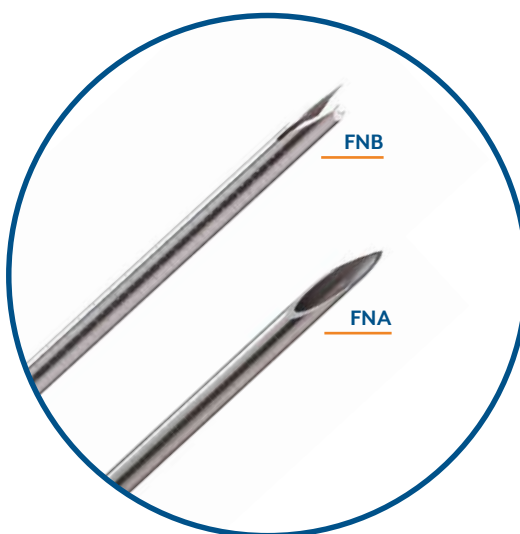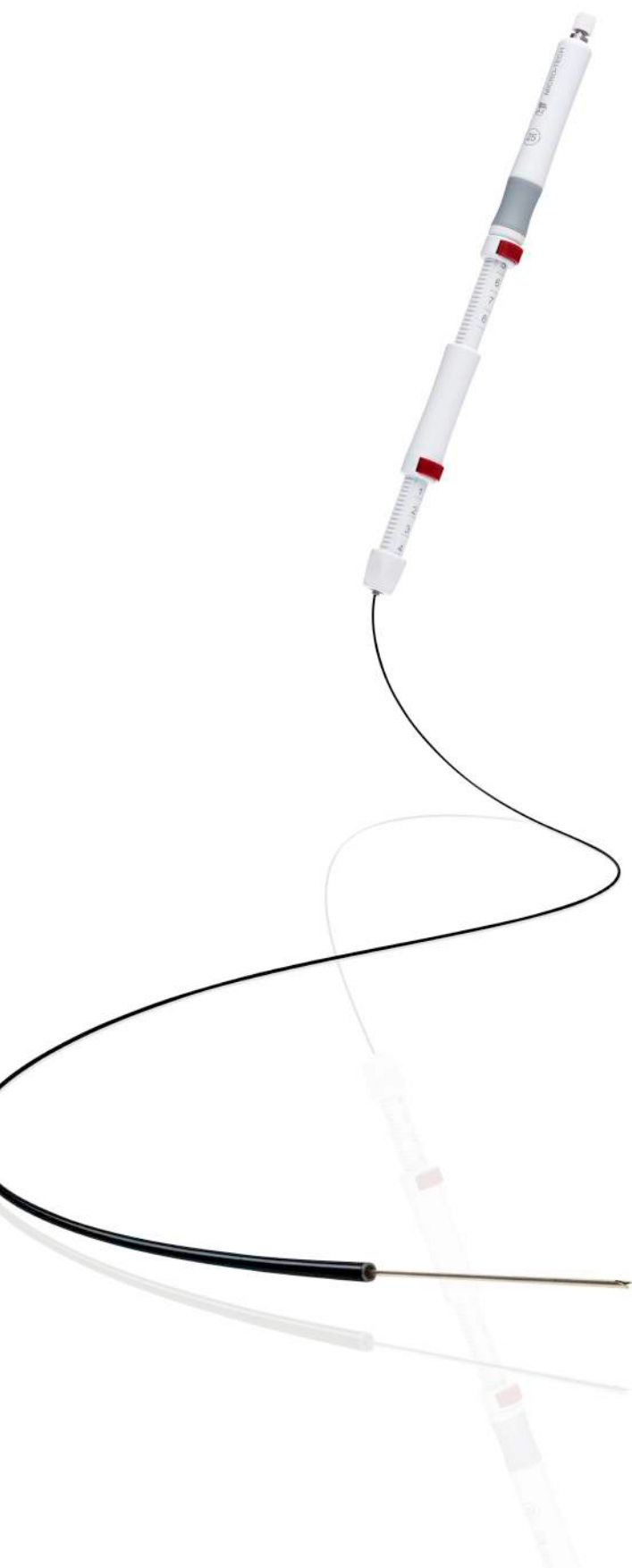

PRINCIPALES VENTAJAS



ESTILETE GRABADO

El grabado en el estilete proporciona una respuesta táctil cuando éste está a punto de salir del eje de la aguja. Este indicador puede ayudar a evitar que el estilete se suelte inesperadamente y provoque contaminación o rocío.

ECOGENICIDAD DE LA AGUJA

Siempre es importante mantener la visibilidad de la punta para obtener una guía precisa dentro del área objetivo. La superficie de la aguja está grabada con láser. Patrón en V, que proporciona una buena visibilidad bajo ultrasonografía.



AJUSTES RÁPIDOS DE LA CAMISA Y DE LA AGUJA

Los botones de ajuste de las agujas para EUS de Micro-Tech ofrecen cambios rápidos y seguros en la profundidad de la aguja y la longitud de la camisa. El diseño ergonómico del mango con un suave deslizamiento proporciona un control preciso con una sola mano.

COBALTO-CROMO (COCR)

Las agujas para EUS Trident™ y Areus™ están fabricadas con una aleación de CoCr que mantiene su forma y afilado a la vez que proporciona durabilidad, flexibilidad y accesibilidad confiable al objetivo.



TAPA PARA MANEJO DEL ESTILETE

Tapa de estilete integrada que sujeta el estilete en forma de lazo de manera segura, para que sea más fácil de manejar.

ADAPT EN NITINOL

Las nuevas agujas ADAPT están especialmente diseñadas para situaciones en que el endoscopio está angulado.

ESPECIFICACIONES

AGUJAS EUS FNB AREUS

Ref	Calibre de la aguja	Diámetro de la camisa (mm)	Tamaño máximo de la aguja (mm)	Tipo de aguja	Tamaño del canal (mm)	Longitud de trabajo (mm)
EUS-25-1-N	25ga	1,8	80	Aleación de Co- Cr	2.8	1375~1415
EUS-22-1-N	22ga	1,8	80	Aleación de Co- Cr	2.8	1375~1415
EUS-19-1-N	19ga	1,8	80	Aleación de Co- Cr	2.8	1375~1415

AGUJAS FLEX EUS FNB TRIDENT

Ref	Calibre de la aguja	Diámetro de la camisa (mm)	Tamaño máximo de la aguja (mm)	Tipo de aguja	Tamaño del canal (mm)	Longitud de trabajo (mm)
EUS-19-1-F	19ga	2,5	80	Nitinol	2.8	1375~1415
EUS-22-1-F	22ga	2,2	80	Nitinol	2.8	1375~1415



ESPECIFICACIONES

AGUJAS EUS FNA AREUS

Ref	Calibre de la aguja	Diámetro de la camisa (mm)	Tamaño máximo de la aguja (mm)	Tipo de aguja	Tamaño del canal (mm)	Longitud de trabajo (mm)
EUS-25-0-N	25ga	1,8	80	Aleación de Co- Cr	2,8	1375~1415
EUS-22-0-N	22ga	1,8	80	Aleación de Co- Cr	2,8	1375~1415
EUS-19-0-N	19ga	1,8	80	Aleación de Co- Cr	2,8	1375~1415

AGUJAS FLEX EUS FNA AREUS

Ref		Calibre de la aguja	Diámetro de la camisa (mm)	Tamaño máximo de la aguja (mm)	Tipo de aguja	Tamaño del canal (mm)	Longitud de trabajo (mm)
EUS-19-0-F	✓	19ga	2,5	80	Nitinol	2,8	1375~1415
EUS-22-0-F		22ga	2,2	80	Nitinol	2,8	1375~1415



CPRE

ESFINTERÓTOMOS

ALAMBRE GUÍA

BALONES PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS

CANASTILLAS PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS

STENTS DE PLÁSTICO

LIBERACIÓN CON ALAMBRE GUIA CORTO



CONTROL TOTAL CON ESFINTEROTOMOS AJUSTABLES

La posición, la canulación y el corte son las características determinantes de una papilotomía segura y exitosa. El papilotomo de 3 lúmenes de Micro-Tech cumple con estos requisitos en todos los sentidos.



PRINCIPALES VENTAJAS

PUNTA AJUSTABLE

Se puede ajustar la dirección de la punta en sentido horario o antihorario desde el mango.

DISEÑO SEGURO

Alambre de corte aislado disponible para evitar que se afecte el área circundante de la papila o que el alambre haga corto circuito con la estructura del endoscopio.

MANGO ERGONÓMICO

Diseño de la empuñadura de 3 anillos para lograr una comodidad óptima del usuario.



ESPECIFICACIONES

PAPILOTOMO, 3-LÚMENES, PUNTA CÓNICA

Ref		Longitud de punta(mm)	Longitud alambre corte (mm)	Alambre de corte parcialmente aislado	Alambre guía precargado	Canal de trabajo mínimo (mm)
DSP-30520-111111		5	20	NO	NO	2,8
DSP-30520-111211	✓	5	20	SI	NO	2,8
DSP-30525-111111		5	25	NO	NO	2,8
DSP-30525-111211		5	25	SI	NO	2,8
DSP-30530-111211		5	30	SI	NO	2,8
DSP-30220-111211		2	20	SI	NO	2,8
DSP-30225-111211		2	25	SI	NO	2,8

PAPILOTOMO, 3 LÚMENES, PUNTA CÓNICA PRECARGADO CON ALAMBRE GUÍA

Ref		Longitud de punta(mm)	Longitud alambre corte (mm)	Alambre de corte parcialmente aislado	Alambre guía precargado	Canal de trabajo mínimo (mm)
DSP-30520-111121		5	20	NO	SI	2,8
DSP-30520-111221	✓	5	20	SI	SI	2,8
DSP-30525-111121		5	25	NO	SI	2,8
DSP-30525-111221		5	25	SI	SI	2,8

PAPILÓTOMO, 3 LUMENES, DE PUNTA

Ref		Longitud de punta(mm)	Longitud alambre corte (mm)	Alambre de corte parcialmente aislado	Alambre guía precargado	Canal de trabajo mínimo (mm)
DSP-30505-121111		0	5	NO	NO	2,8
DSP-30505-121211	✓	0	5	YES	NO	2,8




ACCESO ACELERADO

ALAMBRE GUÍA HYDRO-SLIDE™

Una guía confiable es el núcleo de un procedimiento exitoso. El alambre guía Hydro-Slide™ proporciona la rigidez, la visibilidad y la punta atraumática necesarias para solucionar las estenosis en el tracto gastrointestinal.

El revestimiento de PTFE, el recubrimiento hidrofílico distal y el núcleo de nitinol proporcionan una mejor capacidad de empuje, mientras que la punta blanda cargada de tungsteno permite una gran visibilidad bajo fluoroscopia. El revestimiento de rayas amarillas y azules es un indicador fácil de ver cuando se mueve el alambre guía bajo visualización directa.

- Puntas rectas y anguladas.
- Longitudes de trabajo de 260cm y 450cm.
- Empacado individualmente, 2 unidades por caja.

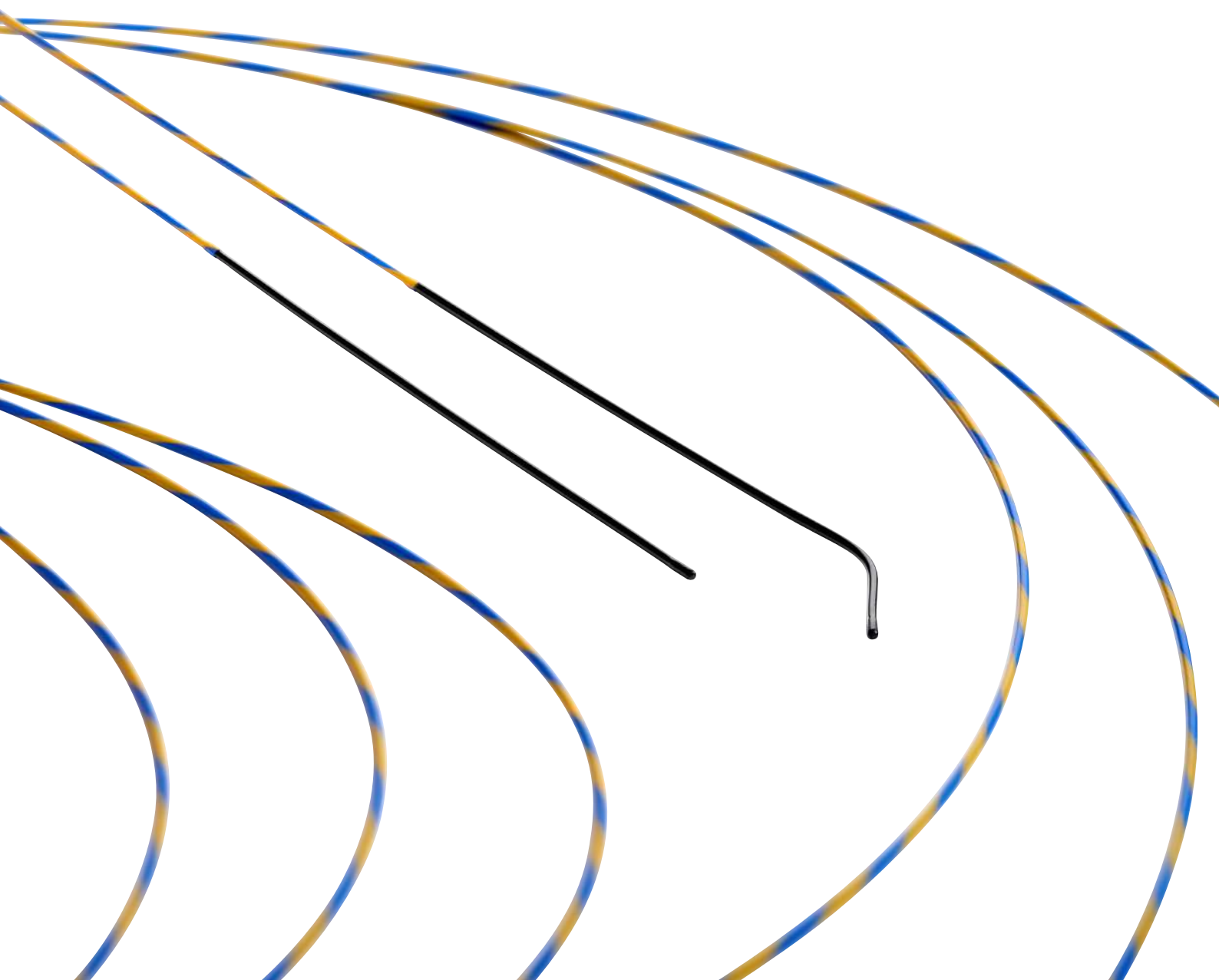

ESPECIFICACIONES

ALAMBRE GUÍA HYDRO-SLIDE de 0,035"

Ref		Descripción	Diámetro de trabajo (in)	Longitud de trabajo (cm)	Embalaje
MTN-BM-89/26-A		Alambre guía Hydro-Slide™ recto	0.035	260	2/Caja
MTN-BM-89/45-A	✓	Alambre guía Hydro-Slide™ recto	0.035	450	2/Caja
MTN-BM-89/45-A-J		Alambre guía Hydro-Slide™ agulado	0.035	450	2/Caja

ALAMBRE GUÍA HYDRO-SLIDE RÍGIDO DE 0,035"

Ref		Descripción	Diámetro de trabajo (in)	Longitud de trabajo (cm)	Embalaje
MTN-BM-89/45-A-S		Alambre guía Hydro-Slide™ rígido	0.035	450	2/Caja

ALAMBRE GUÍA HYDRO-SLIDE DE 0,025"

Ref		Descripción	Diámetro de trabajo (in)	Longitud de trabajo (cm)	Embalaje
MTN-BM-63/45-A		Alambre guía Hydro-Slide™ recto	0.025	450	2/Caja


ALAMBRES GUÍA HYDRO-SLIDE ULTRADELGADOS

Ref		Descripción	Diámetro de trabajo (in)	Longitud de trabajo (cm)	Embalaje
MTN-BM-53/45-A		Alambre guía Hydro-Slide™ recto	0.021	450	2/Caja



UN BALÓN CON TRES DIÁMETROS BALÓN PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS

La amplia gama de productos de Micro-Tech incluye balones de extracción de 3 lúmenes de alta calidad para la eliminación segura de pequeños cálculos y residuos del conducto biliar. Cuentan con un modelo único de hasta 21mm de diámetro.

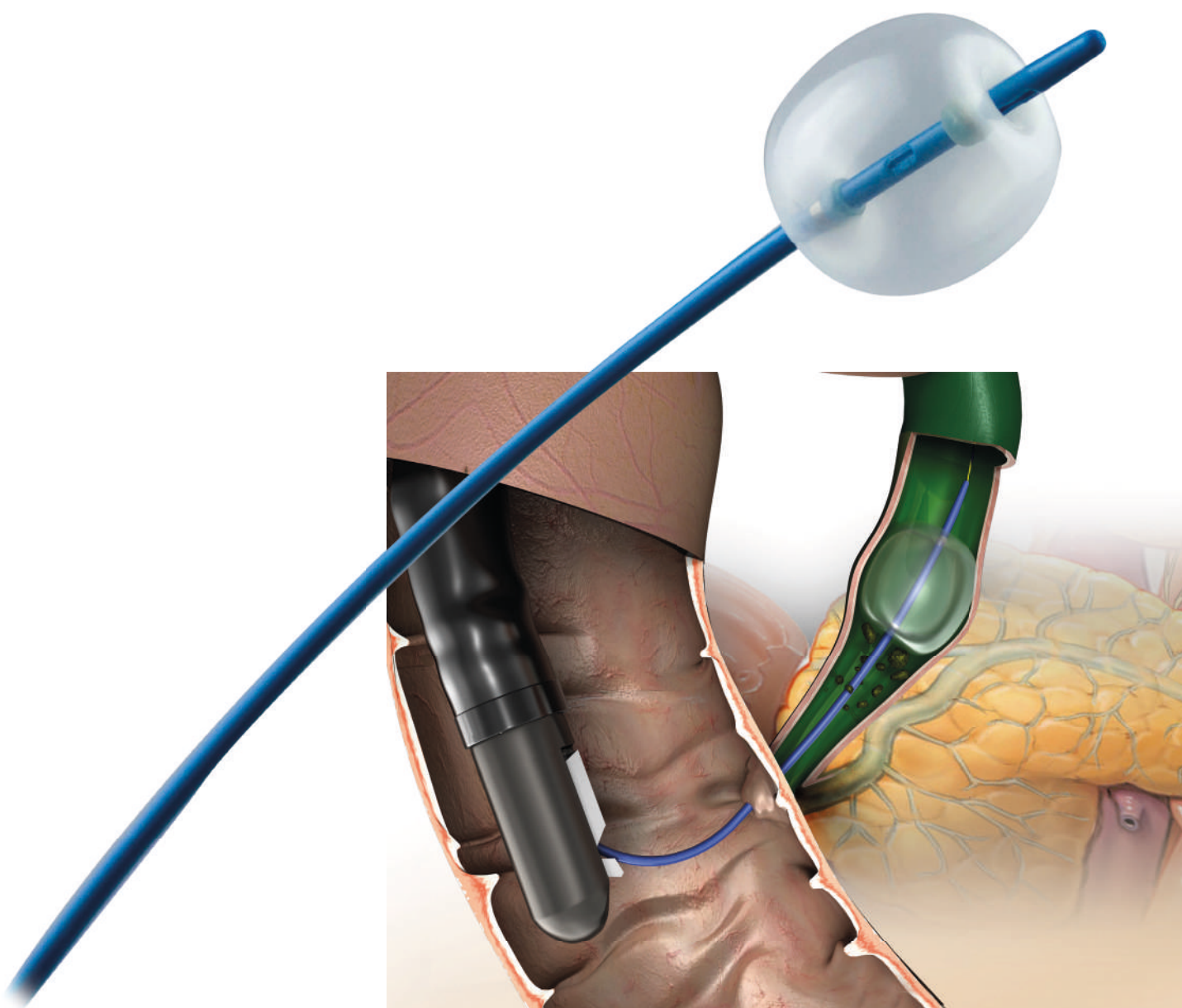

PRINCIPALES VENTAJAS

3 DIÁMETROS

Cada modelo de balón se puede inflar hasta 3 diámetros diferentes.

MUY RESISTENTE

El balón ha demostrado una gran resistencia.

MODELO GRANDE

Un modelo único alcanza hasta los 21mm de diámetro.



ESPECIFICACIONES

Ref		Inyección	Lúmen	Ø del catéter Fr.	Ø del balón (mm)	Longitud de trabajo (mm)
SRB-T-9/12/15-20	✓	Por encima (distal al balón)	3	7	9/12/15	2000
SRB-T-12/15/18-20		Por encima (distal al balón)	3	7	12/15/18	2000
SRB-T-15/18/21-20		Por encima (distal al balón)	3	7	15/18/21	2000



DIVERSOS MODELOS

CANASTILLAS PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS

Las canastillas para extracción de Micro-Tech son muy resistentes y versátiles. Un nuevo modelo especial guiado por alambre guía también es compatible con los sistemas de alambre guía corto.



PRINCIPALES VENTAJAS

GIRATORIA

Permite capturar fácilmente los cálculos.

GUIADA POR ALAMBRE GUÍA

Los nuevos modelos guiados por alambre guía corto ayudarán a capturar los cálculos en posiciones difíciles.

MANGO ERGONÓMICO

El nuevo mango se adapta perfectamente a las manos de cualquier usuario.



ESPECIFICACIONES

CANASTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS

Ref	Tipo de canastilla	Diámetro canastilla (mm)	Longitud de canastilla (mm)	Diámetro del catéter (Fr)	Longitud de trabajo (mm)	Tamaño del canal (mm)	Embalaje
SEB111/1570200-P	Hexagonal	15	40	7	2000	2,8	2/Caja
SEB111/2070200-P	Hexagonal	20	45	7	2000	2,8	2/Caja
SEB111/2570200-P	✓ Hexagonal	25	50	7	2000	2,8	2/Caja
SEB111/3070200-P	Hexagonal	30	55	7	2000	2,8	2/Caja


CANASTILLA PARA EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS - GUIADA POR ALAMBRE GUÍA

Ref	Tipo de canastilla	Diámetro canastilla (mm)	Longitud de canastilla (mm)	Diámetro del catéter (Fr)	Longitud de trabajo (mm)	Tamaño del canal (mm)	Embalaje
RSEB-H4-15	Hexagonal	15	40	7	2000	2,8	2/Caja
RSEB-H4-20	Hexagonal	20	45	7	2000	2,8	2/Caja
RSEB-H4-25	✓ Hexagonal	25	50	7	2000	2,8	2/Caja
RSEB-H4-30	Hexagonal	30	55	7	2000	2,8	2/Caja



FÁCIL DRENAJE STENTS DE PLÁSTICO

Los stents de plástico de Micro-Tech están disponibles para utilizar con alambres guía cortos y largos.

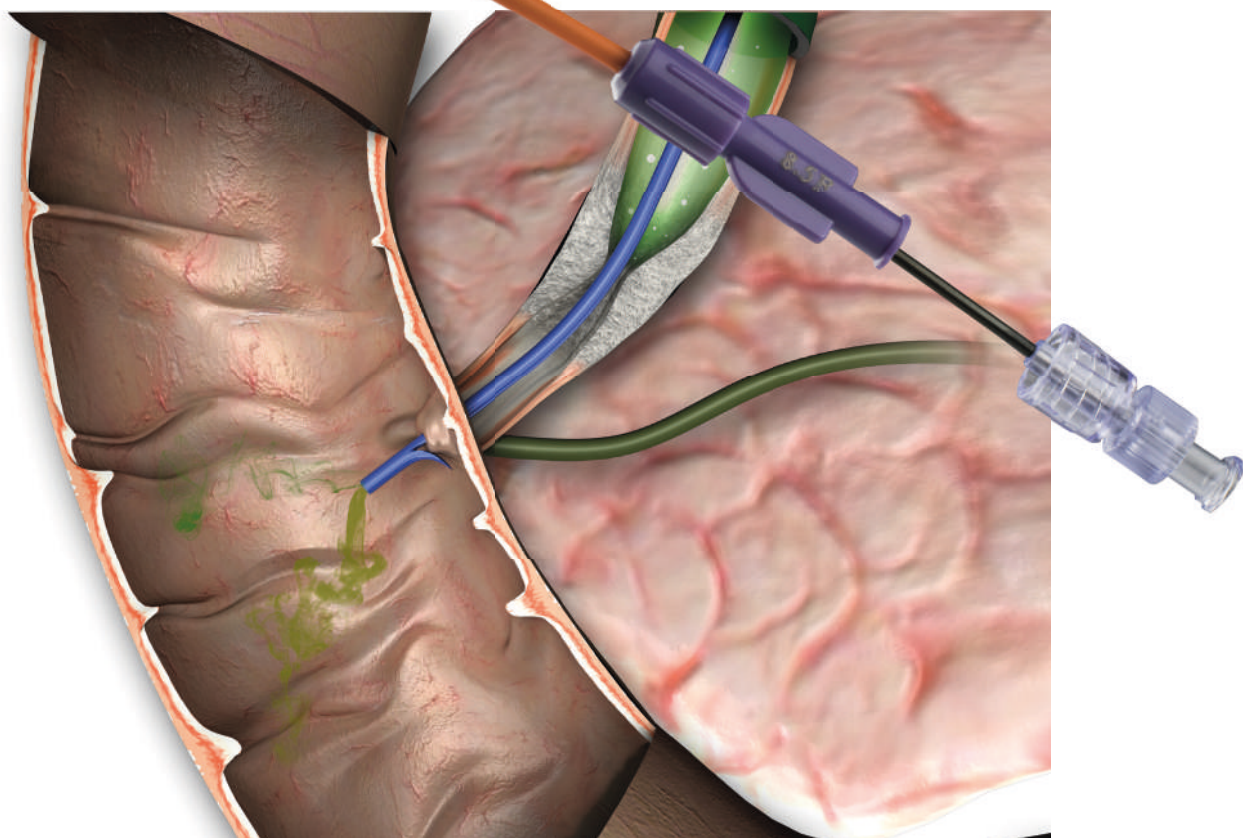

PRINCIPALES VENTAJAS

FÁCIL DE APLICAR

Sistema de liberación fácil e intuitivo.

DIVERSAS FORMAS

Los stents de plástico están disponibles en diferentes formas y tamaños.

ALAMBRES GUÍA CORTOS Y LARGOS

Los stents de plástico de Micro-Tech están disponibles para ambos sistemas de alambres guía cortos y largos.



ESPECIFICACIONES



STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR

Ref		Forma del stent	Diámetro del stent (Fr)	Longitud de trabajo (mm)	Embalaje
BPDS-33114-0707		Curva duodenal	7	70	10/Caja
BPDS-33114-0710		Curva duodenal	7	100	10/Caja
BPDS-33114-0712		Curva duodenal	7	120	10/Caja
BPDS-33114-0715		Curva duodenal	7	150	10/Caja
BPDS-33114-0807		Curva duodenal	8,5	70	10/Caja
BPDS-33114-0810		Curva duodenal	8,5	100	10/Caja
BPDS-33114-0812		Curva duodenal	8,5	120	10/Caja
BPDS-33114-0815		Curva duodenal	8,5	150	10/Caja
BPDS-33114-1007		Curva duodenal	10	70	10/Caja
BPDS-33114-1010		Curva duodenal	10	100	10/Caja
BPDS-33114-1012	✓	Curva duodenal	10	120	10/Caja
BPDS-33114-1015		Curva duodenal	10	150	10/Caja



STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR

Ref		Forma del stent	Diámetro del stent (Fr)	Longitud de trabajo (mm)	Embalaje
BPDS-31114-0707		Recto	7	70	10/Caja
BPDS-31114-0710		Recto	7	100	10/Caja
BPDS-31114-0712		Recto	7	120	10/Caja
BPDS-31114-0715		Recto	7	150	10/Caja
BPDS-31114-0810		Recto	8,5	100	10/Caja
BPDS-31114-0812		Recto	8,5	120	10/Caja
BPDS-31114-1007	✓	Recto	10	70	10/Caja
BPDS-31114-1010	✓	Recto	10	100	10/Caja
BPDS-31114-1012	✓	Recto	10	120	10/Caja
BPDS-31114-1015		Recto	10	150	10/Caja

ESPECIFICACIONES



STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR

Ref		Forma del stent	Diámetro del stent (Fr)	Longitud de trabajo (mm)	Embalaje
BPDS -31993-0705	✓	Pigtail doble	7	50	10/Caja
BPDS -31993-0707		Pigtail doble	7	70	10/Caja
BPDS -31993-0710	✓	Pigtail doble	7	100	10/Caja
BPDS -31993-0712		Pigtail doble	7	120	10/Caja
BPDS -31993-0805		Pigtail doble	8,5	50	10/Caja
BPDS -31993-0807		Pigtail doble	8,5	70	10/Caja
BPDS -31993-0810		Pigtail doble	8,5	100	10/Caja
BPDS -31993-0812		Pigtail doble	8,5	120	10/Caja
BPDS -31993-1005	✓	Pigtail doble	10	50	10/Caja
BPDS -31993-1007		Pigtail doble	10	70	10/Caja
BPDS -31993-1010	✓	Pigtail doble	10	100	10/Caja
BPDS -31993-1012		Pigtail doble	10	120	10/Caja

SISTEMA INTRODUTOR DE STENTS PLÁSTICOS PARA DRENAJE BILIAR

Ref		Diámetro del stent (Fr)	Longitud del stent (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Tamaño del canal Ø (mm)	Alambre guía compatible (mm)	Embalaje
BPDI-0720/22		7	<200	2200	2,8	,035	2/Caja
BPDI-0820/22		8.5	<200	2200	2,8	,035	2/Caja
BPDI-1020/22	✓	10	<200	2200	2,8	,035	2/Caja

ESPECIFICACIONES



STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR CON SISTEMA INTRODUTOR

Ref		Forma del stent	Diámetro del stent (Fr)	Longitud del stent (mm)	Alambre guía recomendado (in)	Embalaje
BPDS - 32114 - 0707/22	✓	Tipo Ámsterdam	7	70	,035	2/Caja
BPDS - 32114 - 0710/22	✓	Tipo Ámsterdam	7	100	,035	2/Caja
BPDS - 32114 - 0712/22	✓	Tipo Ámsterdam	7	120	,035	2/Caja
BPDS - 32114 - 0715/22		Tipo Ámsterdam	7	150	,035	2/Caja
BPDS - 32114 - 0807/22		Tipo Ámsterdam	8,5	70	,035	2/Caja
BPDS - 32114 - 0810/22		Tipo Ámsterdam	8,5	100	,035	2/Caja
BPDS - 32114 - 0812/22		Tipo Ámsterdam	8,5	120	,035	2/Caja
BPDS - 32114 - 0815/22		Tipo Ámsterdam	8,5	150	,035	2/Caja
BPDS - 32114 - 1007/22	✓	Tipo Ámsterdam	10	70	,035	2/Caja
BPDS - 32114 - 1010/22	✓	Tipo Ámsterdam	10	100	,035	2/Caja
BPDS - 32114 - 1012/22	✓	Tipo Ámsterdam	10	120	,035	2/Caja
BPDS - 32114 - 1015/22		Tipo Ámsterdam	10	150	,035	2/Caja
BPDS-31114-1009/22		Tipo Ámsterdam	10	90	,035	2/Caja
BPDS-32114-0810/22		Tipo Ámsterdam	8,5	100	,035	2/Caja
BPDS-32114-1007		Tipo Ámsterdam	10	70	,035	2/Caja
BPDS-32114-1010/22		Tipo Ámsterdam	10	100	,035	2/Caja
BPDS-32114-1012/22		Tipo Ámsterdam	10	120	,035	2/Caja



STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR CON SISTEMA INTRODUTOR

Ref		Forma del stent	Diámetro del stent (Fr)	Longitud del stent (mm)	Alambre guía recomendado (in)	Embalaje
BPDS-33114-0707/22		Curva duodenal	7	70	,035	2/Caja
BPDS-33114-0710/22		Curva duodenal	7	100	,035	2/Caja
BPDS-33114-0712/22		Curva duodenal	7	120	,035	2/Caja
BPDS-33114-0715/22		Curva duodenal	7	150	,035	2/Caja
BPDS-33114-0807/22		Curva duodenal	8,5	70	,035	2/Caja
BPDS-33114-0810/22		Curva duodenal	8,5	100	,035	2/Caja
BPDS-33114-0812/22		Curva duodenal	8,5	120	,035	2/Caja
BPDS-33114-0815/22		Curva duodenal	8,5	150	,035	2/Caja
BPDS-33114-1007/22		Curva duodenal	10	70	,035	2/Caja
BPDS-33114-1010/22	✓	Curva duodenal	10	100	,035	2/Caja
BPDS-33114-1012/22	✓	Curva duodenal	10	120	,035	2/Caja
BPDS-33114-1015/22		Curva duodenal	10	150	,035	2/Caja

ESPECIFICACIONES



STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR CON SISTEMA INTRODUTOR

Ref		Forma del stent	Diámetro del stent (Fr)	Longitud del stent (mm)	Alambre guía recomendado (in)	Embalaje
BPDS-31114-0707/22	✓	Recto	7	70	,035	2/Caja
BPDS-31114-0710/22	✓	Recto	7	100	,035	2/Caja
BPDS-31114-0712/22	✓	Recto	7	120	,035	2/Caja
BPDS-31114-0715/22		Recto	7	150	,035	2/Caja
BPDS-31114-0807/22		Recto	8,5	70	,035	2/Caja
BPDS-31114-0810/22		Recto	8,5	100	,035	2/Caja
BPDS-31114-0812/22		Recto	8,5	120	,035	2/Caja
BPDS-31114-0815/22		Recto	8,5	150	,035	2/Caja
BPDS-31114-1007/22	✓	Recto	10	70	,035	2/Caja
BPDS-31114-1010/22	✓	Recto	10	100	,035	2/Caja
BPDS-31114-1012/22	✓	Recto	10	120	,035	2/Caja
BPDS-31114-1015/22		Recto	10	150	,035	2/Caja



STENT PLÁSTICO PARA DRENAJE BILIAR CON SISTEMA INTRODUTOR


Ref		Forma del stent	Diámetro del stent (Fr)	Longitud del stent (mm)	Alambre guía recomendado (in)	Embalaje
BPDS -31993-0705/22	✓	Pigtail doble	7	50	,035	2/Caja
BPDS -31993-0707/22		Pigtail doble	7	70	,035	2/Caja
BPDS -31993-0710/22		Pigtail doble	7	100	,035	2/Caja
BPDS -31993-0712/22		Pigtail doble	7	120	,035	2/Caja
BPDS -31993-0805/22		Pigtail doble	8,5	50	,035	2/Caja
BPDS -31993-0807/22		Pigtail doble	8,5	70	,035	2/Caja
BPDS -31993-0810/22		Pigtail doble	8,5	100	,035	2/Caja
BPDS -31993-0812/22		Pigtail doble	8,5	120	,035	2/Caja
BPDS -31993-1005/22	✓	Pigtail doble	10	50	,035	2/Caja
BPDS -31993-1007/22		Pigtail doble	10	70	,035	2/Caja
BPDS -31993-1010/22		Pigtail doble	10	100	,035	2/Caja
BPDS -31993-1012/22		Pigtail doble	10	120	,035	2/Caja

LIBERACIÓN CONSISTENTE

STENT PLÁSTICO REPOSICIONABLE CON SISTEMA DE ALAMBRE GUÍA CORTO

Los stents plásticos con sistema de alambre corto de Micro-Tech Endoscopy funcionan de manera consistente y son fáciles de usar. Cuentan con las siguientes características:

- La rosca para el reposicionamiento permite efectuar un reajuste distal en caso de que el stent se coloque demasiado arriba.
- Stent y catéter guía cónicos para facilitar su inserción.
- Mango de fácil uso con función de bloqueo.

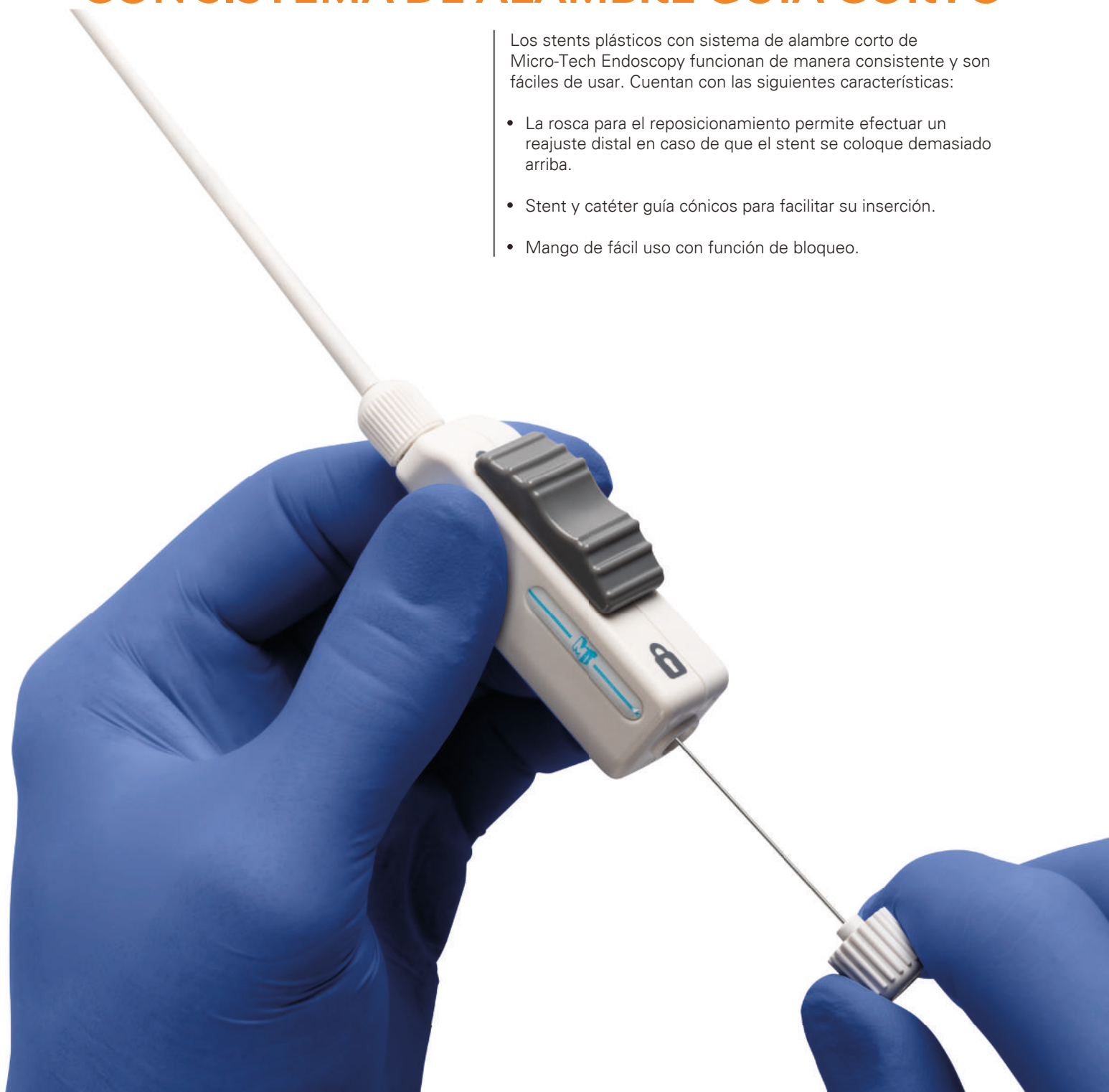

PRINCIPALES VENTAJAS

MANGO ERGONÓMICO

La función de bloqueo ofrece un control óptimo durante la implantación.

ALAMBRE PARA REPOSICIONAR Y MARCADOR RADIOPAKO

Visualización y control permanente para una mayor seguridad.

STENT Y CATÉTER GUÍA CÓNICOS

Inserción suave y fácil recanalación.



ESPECIFICACIONES



STENT PLÁSTICO CURVO CON SISTEMA DE LIBERACIÓN

Ref		Diámetro del stent (Fr)	Longitud de trabajo (mm)	Embalaje
RBPDS-3210-05/20	✓	10	50	10/Caja
RBPDS-3210-07/20	✓	10	70	10/Caja
RBPDS-3210-10/20	✓	10	100	10/Caja
RBPDS-3210-12/20		10	120	10/Caja
RBPDS-3210-15/20		10	150	10/Caja



COLANGIOSCOPIA

EYEMAX

PINZA DE BIOPSIA

CANASTILLA DE EXTRACION

CAP DE VISUALIZACION



LA REVOLUCIÓN DEL DIAGNÓSTICO y TRATAMIENTO CON eyeMAX™

eyeMAX™ ofrece una resolución de imagen en alta definición para apoyar la detección precisa y la intervención terapéutica y visualización directa en tiempo real en enfermedades agudas y crónicas del tracto biliar y pancreático. eyeMAX™ te brinda la claridad y el control necesarios dentro del sistema ductal.

Con una calidad de imagen incomparable, balance de blancos y disponible en varios tamaños de canal de trabajo y longitudes, eyeMAX™ te permite ver más, hacer más y perder menos, todo con una mínima alteración de tu flujo de trabajo.

Totalmente compatible con todos los dispositivos estándar de litotricia electrohidráulica (EHL) y laser.

No es una Evolución, **es una Revolución!**



ESPECIFICACIONES

eyeMAX™ CONSOLA

Ref	Descripción	Voltaje	Frecuencia	Funciones
BS-W-100	Consola	100/240V	50/60Hz	LED, Balance de color blanco, brillo, 3X zoom, forma de la imagen ajustable

eyeMAX™ COLEDOSCOPIOS PERORAL, USO ÚNICO

Ref	Descripción	Campo de visión	Diámetro de inserción (mm)	Longitud (mm)	Canal de trabajo (mm)
CDS11001	11.1Fr	120	3,9	2200	2,0
CDS22001	9.3Fr	120	3,2	2200	1,2

Accesorios - Pinza de biopsia

Ref	Descripción	Diámetro (mm)	Canal de Trabajo	Longitud (mm)	Apertura (mm)
BF10006	Cam Alligator	1,0	1,2	2900	3,0
BF16006	Twin Wire Alligator	1,6	2	2900	4,5

Accesorios - Cap para visualización

Ref	Descripción	Canal de trabajo compatible (mm)	Max OD (mm)	Tipo	Longitud de protrusión desde el extremo distal
VC34037	9.3F	≥4.2	φ3.7	Cónico	6,5
VC23037	9.3F	≥4.2	φ3.7	Cilíndrico	4,5
VC23045	11.1F		4,5	Cónico	4,5
VC34045	11.1F		4,5	Cilíndrico	6,5

Accesorios - Canastilla de extracción

Ref	Descripción	Diametro de canasta (mm)	Longitud (mm)	Canal de trabajo mínimo (mm)
CEB00000	10mm	10	2900	1,1
CEB01010	15mm	15	2900	1,1
CEB02023	20mm	20	1200	1,1



ESPECIFICACIONES

eyeMAX™ COLEDOSCOPIOS PERCUTANEO,USO ÚNICO

Ref	Descripción	Campo de visión	Diámetro de inserción (mm)	Longitud (mm)	Canal de trabajo (mm)
CDS11005	11.1Fr	120	3,9	650	2,0
CDS22005	9.3Fr	120	3,2	650	1,2

Accesorios - Pinza de biopsia

Ref	Descripción	Diámetro (mm)	Canal de Trabajo	Longitud (mm)	Apertura (mm)
BF10001	Cam Alligator	1,0	1,2		3,0
BF16001	Twin Wire Alligator	1,6	2		4,5



CIRURGIA ENDOSCOPICA

GOLD KNIFE

SURE TRAC

CIERRE DE DEFECTOS

DAT - DUAL ACTION TISSUE

S.T.A.R - SECURE TISSUE ACQUISITION RING

LOCKADO



GOLDKNIFE

UN BISTURÍ DE PRINCIPIO A FIN

El GOLDKNIFE de MICRO-TECH permite realizar disecciones submucosas endoscópicas eficaces y fiables. Gracias a la combinación de irrigación a través del bisturí y la electrocirugía, todos los pasos de trabajo - marcado, inyección, disección y coagulación, pueden realizarse sin cambiar de instrumento. Cuenta con:

- Tres formas de punta de bisturíes
- Modelos de bisturí con diferentes longitudes
- Corte afilado
- Bisturí bañado en oro



TIPO T: Ideal para disecar bajo tensión. Mejores opciones de coagulación y dirección de corte optimizada mientras se diseca

TIPO I: Gran libertad de movimiento, versátil, mayor nivel de dificultad

TIPO O: La punta en forma de media luna maximiza el efecto de coagulación

PRINCIPALES VENTAJAS

INYECCIÓN A TRAVÉS DEL BISTURÍ

Permite una inyección de alta presión y la capacidad de crear un cojín.

BISTURÍ DE DIÁMETRO PEQUEÑO

Ayuda a realizar un corte afilado y a disminuir el riesgo de lesiones térmicas.

REVESTIMIENTO EN ORO

Evita que el tejido se pegue al bisturí.



ESPECIFICACIONES

GOLDKNIFE - TIPO I

Ref		Forma de la punta del bisturí	Longitud de la punta del bisturí (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Ø del canal de trabajo (mm)	Empaque
MK-I-1-195		I	1.5	1950	<2.7	1/Caja
MK-I-1-235		I	1.5	2350	<2.7	1/Caja
MK-I-2-195		I	2	1950	<2.7	1/Caja
MK-I-2-235	✓	I	2	2350	<2.7	1/Caja
MK-I-4-195		I	4	1950	<2.7	1/Caja
MK-I-4-235		I	4	2350	<2.7	1/Caja

GOLDKNIFE - TIPO O

Ref		Forma de la punta del bisturí	Longitud de la punta del bisturí (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Ø del canal de trabajo (mm)	Empaque
MK-O-1-195		O	1.5	1950	<2.7	1/Caja
MK-O-1-235		O	1.5	2350	<2.7	1/Caja
MK-O-2-195	✓	O	2	1950	<2.7	1/Caja
MK-O-2-235		O	2	2350	<2.7	1/Caja
MK-O-4-195		O	4	1950	<2.7	1/Caja
MK-O-4-235		O	4	2350	<2.7	1/Caja

GOLDKNIFE - TIPO T

Ref		Forma de la punta del bisturí	Longitud de la punta del bisturí (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Ø del canal de trabajo (mm)	Empaque
MK-T-1-195	✓	T	1.5	1950	<2.7	1/Caja
MK-T-1-235		T	1.5	2350	<2.7	1/Caja
MK-T-2-195	✓	T	2	1950	<2.7	1/Caja
MK-T-2-235	✓	T	2	2350	<2.7	1/Caja
MK-T-4-195		T	4	1950	<2.7	1/Caja
MK-T-4-235		T	4	2350	<2.7	1/Caja



ESPECIFICACIONES

GOLDKNIFE - TIPO IT

Ref	Forma de la punta del bisturí	Longitud de la punta del bisturí (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Ø del canal de trabajo (mm)	Empaque
MK-IT-4-195	IT	4	1950	<2.7	1/Caja
MK-IT-4-235	IT	4	2350	<2.7	1/Caja



MARCADO



COJÍN DE AGUA POR INYECCIÓN



DISECCIÓN



RESULTADOS POST
PROCEDIMIENTO

DISECCIÓN VISUALIZADA

SISTEMA DE TRACCIÓN

SURETRAC™

El sistema SureTrac™ retrae el tejido para facilitar la exposición, disección y extracción de tejido en el estómago y el colon. El sistema SureTrac incluye un anillo elástico de silicona precargado en un clip primario y un clip secundario para anclaje en el tejido. El anillo de silicona superelástico está diseñado para retraer y liberar energía potencial elástica para una tracción dinámica; esto permite una mejor visualización y maniobrabilidad de los tejidos durante la disección de lesiones submucosas.

Cada kit incluye:

- Un clip principal SureClip® precargado con un anillo de silicona.
- Un clip secundario del mismo tamaño que el clip principal, disponible en el diseño SureClip® o Lockado®.



ESPECIFICACIONES

KIT SURETRAC ESTÉRIL 2

Ref.	Descripción	Tamaño del Clip	Diseño del Clip secundario	Diámetro mínimo de canal de trabajo	Empaque
ETS00004	Dispositivo de tracción elástica SureTrac	11 mm	SureClip	2.8 mm	1/Caja
ETS00006	Dispositivo de tracción elástica SureTrac	16 mm	SureClip	2.8 mm	1/Caja
ETS10004	Dispositivo de tracción elástica SureTrac	11 mm	Lockado	2.8 mm	1/Caja
ETS10006	Dispositivo de tracción elástica SureTrac	16 mm	Lockado	2.8 mm	1/Caja
ETS00006	Dispositivo de tracción elástica SureTrac	16 mm	SureClip	2.8 mm	1/Caja




AGARRAR, APROXIMAR Y CERRAR

DISPOSITIVO DE CIERRE DE TEJIDO DE DOBLE ACCIÓN

Los dispositivos de cierre de defectos gastrointestinales deben ser rápidos, fáciles de usar y eficaces. El dispositivo de cierre DAT tiene un poste central flanqueado por dos brazos que pueden operar independientemente para capturar tejido y ayudar en la manipulación para cerrar defectos de la mucosa.

El dispositivo de cierre DAT se puede reposicionar antes de su despliegue y se puede usar solo o para aproximar los márgenes del tejido y mantenerlos en su lugar mientras se colocan otros clips a través del endoscopio para asegurar aún más el cierre del defecto.

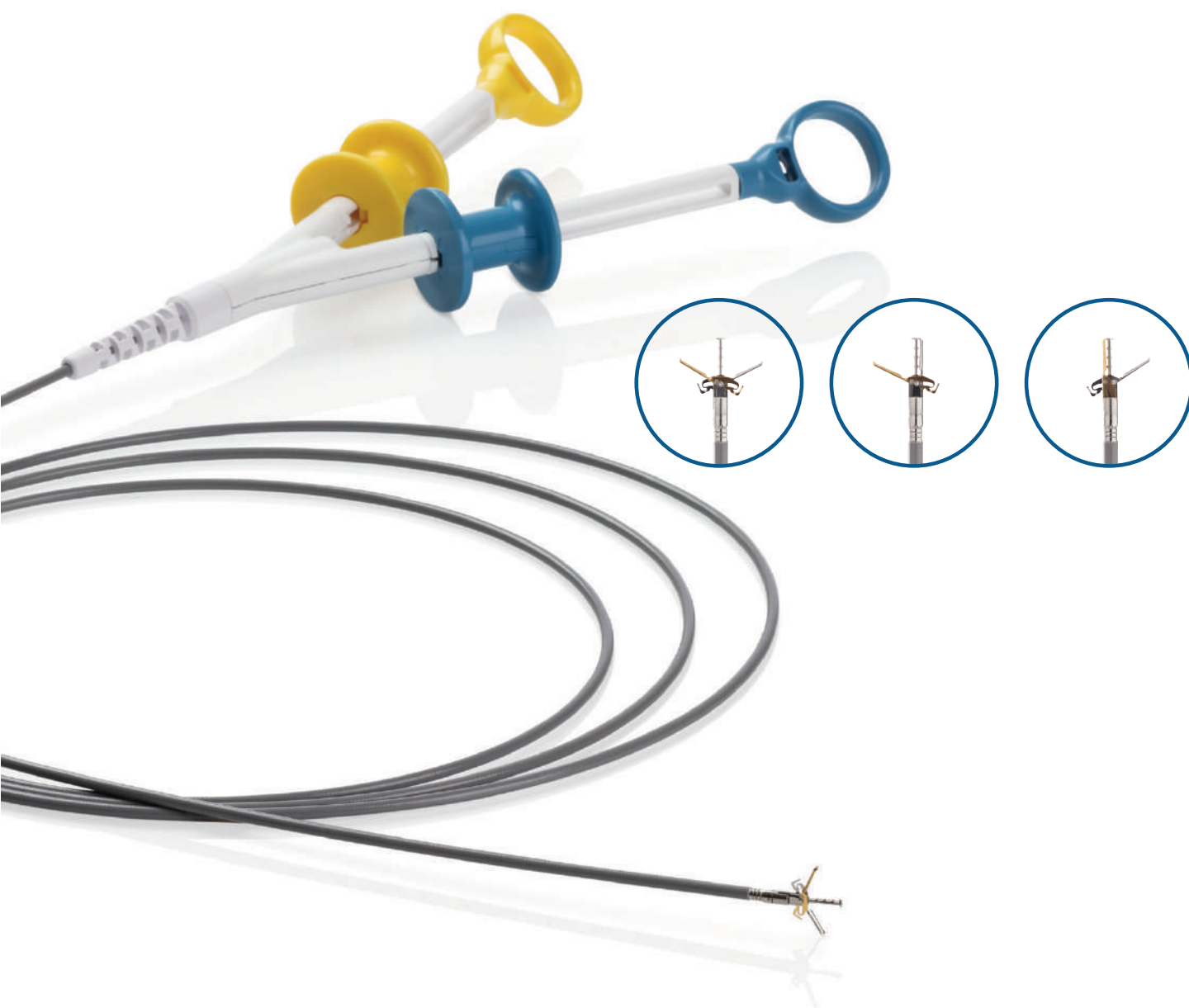

ESPECIFICACIONES

ESTÉRIL

DISPOSITIVO DE CIERRE DAT

Ref	Descripción	Ancho de Apertura (mm)	Longitud de trabajo (cm)	Tamaño Mínimo del Canal (cm)	Empaque
STA00001	Dispositivo de Cierre DAT - Gastroscopio	15	165	3.2	1/Caja
STA00002	Dispositivo de Cierre DAT - Gastroscopio	15	195	3.2	1/Caja
STA00003	Dispositivo de Cierre DAT - Gastroscopio	15	235	3.2	1/Caja



SIMPLICIDAD EN SITUACIONES DIFÍCILES

DISPOSITIVO DE CIERRE S.T.A.R.

El dispositivo de cierre S.T.A.R. (Secure Tissue Acquisition Ring) es un sistema de clips over-the-scope diseñado para ayudar con grandes defectos y proporcionar un cierre seguro cuando más lo necesitas.

El clip se monta en la punta del endoscopio en un solo paso y deja el canal de trabajo abierto. La palanca de despliegue funciona igual que los clips de hemostasia convencionales y libera el S.T.A.R. sobre el tejido con facilidad.





LARGO (17mm)



ESTÁNDAR (14,5mm)

ESPECIFICACIONES

DISPOSITIVO DE CIERRE S.T.A.R. STERILE

Ref	Descripción	Diámetro del endoscopio (mm)	Diámetro del clip (mm)	Longitud de trabajo (cm)	Empaque
HCCD-0-165-M-C	Dispositivo de cierre, estándar	9.5-12	14.5	165	1/Caja
HCCD-0-195-M-C	Dispositivo de cierre, estándar	9.5-12	14.5	195	1/Caja
HCCD-0-235-L-C	Dispositivo de cierre, estándar	11.5-14	14.5	235	1/Caja
HCCD-1-235-L-C	Dispositivo de cierre, largo	11.5-142	17	235	1/Caja

INDICACIONES DE USO

El dispositivo está indicado para endoscopia flexible y para compresión de tejido en el tracto gastrointestinal (GI), para hemostasia o para el tratamiento de lesiones en la pared de órganos gastrointestinales, así como para el marcado de lesiones. El dispositivo está indicado para la colocación de clips dentro del tracto GI con los siguientes fines:

Marcado endoscópico

Hemostasia para:

- Defectos mucosos/submucosos < 3 cm
- Úlceras sangrantes
- Arterias < 2 mm
- Pólipos < 1,5 cm de diámetro
- Divertículos en el colon

Cierre de perforaciones lumbinales del tracto GI < 20 mm que puedan tratarse de manera conservadora.

AGARRE MÁS FUERTE, MÁS CONTROL

CLIP PARA HEMOSTASIA LOCKADO™

Los clips para hemostasia deben proporcionar exactitud, fiabilidad y una funcionalidad precisa. Lockado™ permite la apertura y el cierre sin restricciones, por lo que puede reposicionarse hasta alcanzar la posición deseada.

Con dos conjuntos de dientes atraumáticos opuestos en los brazos del clip, Lockado™ ofrece un agarre fiable y seguro para un rendimiento constante. Respaldado por el comprobado sistema de aplicación de clips de Micro-Tech Endoscopy, el clip Lockado proporciona una fiabilidad y un manejo del tejido excepcionales.

- El estilo de la mandíbula funciona para múltiples aplicaciones clínicas.
- Puede utilizarse con un endoscopio de visión lateral.
- El vástago más corto hace que los clips sean menos molestos.
- Variedad de tamaños: 11mm, 16mm y el NUEVO con apertura de 22mm.
- Indicados para el anclaje de sondas de alimentación yeyunales.



ESPECIFICACIONES

Ref	Ancho de apertura(mm)	Diámetro de la camisa (mm)	Longitud de trabajo (mm)	Tamaño mínimo del canal (mm)	Empaque
LOCK-G-26-235-C-N 	22	2,6	2350	2,8	10/Caja





latam.mtmed.com

©2026 Micro-Tech Endoscopy USA Inc. Derechos reservados.

lit number 00008-2026